

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

MÁY KHOAN CỬA ĐIỆN Y TẾ

Chủng loại: RJ-MP; RJ-PS; RJ-PD; RJ-W-MZ-1

Hướng dẫn sử dụng:

1.) Chuẩn bị trước khi phẫu thuật

- Đảm bảo công suất nguồn điện là 220V/50Hz
- Kiểm tra để chắc chắn nút khởi động ở trạng thái tắt trước khi phẫu thuật để tránh tai nạn.
- Vỏ bọc ngoài sử dụng 1 lần nên được bọc quanh tay khoan và dây nguồn ở điều kiện vô trùng trước khi phẫu thuật để tránh máu, nước... ngấm vào trong máy khoan.
- điều chỉnh tốc độ vòng quay:

Tốc độ được điều chỉnh từ 0 đến tối đa 1200 vòng / phút bằng cách nhấn vào công tắc hoặc nhấn vào nút bấm điều chỉnh vòng quay ở tay khoan như hình minh họa. Xoay nút điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ để tăng tốc độ vòng quay và ngược chiều kim đồng hồ để giảm tốc độ vòng quay. Tốc độ có thể được cố định bằng cách nhấn nút dừng tốc độ ở 600 vòng/phút là thích hợp cho phẫu thuật.

- Xác nhận hướng vòng quay của mũi khoan

Vòng quay của mũi khoan theo chiều kim đồng hồ bằng cách nhấn vào bên phải (nút-R) của công tắc đảo chiều hoạt động. Nút bên trái (nút-L) được nhấn để đảo chiều mũi khoan hoạt động ngược chiều kim đồng hồ. Trạng thái ở nút-R thích hợp hơn cho phẫu thuật.

Cảnh báo: Không bao giờ được đổi hướng của vòng quay của mũi khoan khi đang hoạt động. Tắt công tắc trước khi chuyển hướng của vòng quay để tránh khoan bị cháy hỏng.



2.) Sự kết nối giữa tay khoan và đầu mũi khoan

Như hình minh họa, kéo phần nhô lên của ngàm khoan ngược lại phía sau cho đến khi cơ chế tự khoá bên trong của tay khoan được khởi động, cho mũi khoan vào lỗ của kết nối ở tay khoan, tháo đầu vận mang ranh được bọc ra. Mũi khoan sẽ được tự động khoá.

3.) Lắp mũi khoan xoắn vào trong ngàm khoan và siết chặt bằng khoá

4.) Điều chỉnh độ sâu của mũi khoan có thể điều chỉnh



GIÁM ĐỐC
Đoàn Thị Hương

