




**NHÃN SẢN PHẨM**

Tên trang thiết bị y tế : Bộ dây truyền máu  
Mã sản phẩm : Xem trên bao bì  
Chủng loại : Disposable Blood Transfusion Sets  
Số lưu hành:.....

**Nguyễn Thanh Tùng**

Công ty sở hữu lưu hành : **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT**  
Số 29/9 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang  
Hãng / nước sản xuất : **Ningbo Yingmed Medical Instruments Co.,Ltd**  
Room 705, Yingsheng Building, No. 456, Tai'an RD, Southern Business Zone, Yinzhou District, 315199  
Ningbo City, People's Republic of China  
Xuất xứ : Trung Quốc  
Ngày sản xuất xem “ MFD: ” (Theo thứ tự tháng / năm)  
Hạn sử dụng xem “ EXP: ” (Theo thứ tự tháng / năm)  
Số lô : “ LOT NO ”  
Hướng dẫn sử dụng xem tại tài liệu đi kèm sản phẩm.

**NHÃN GÓC**

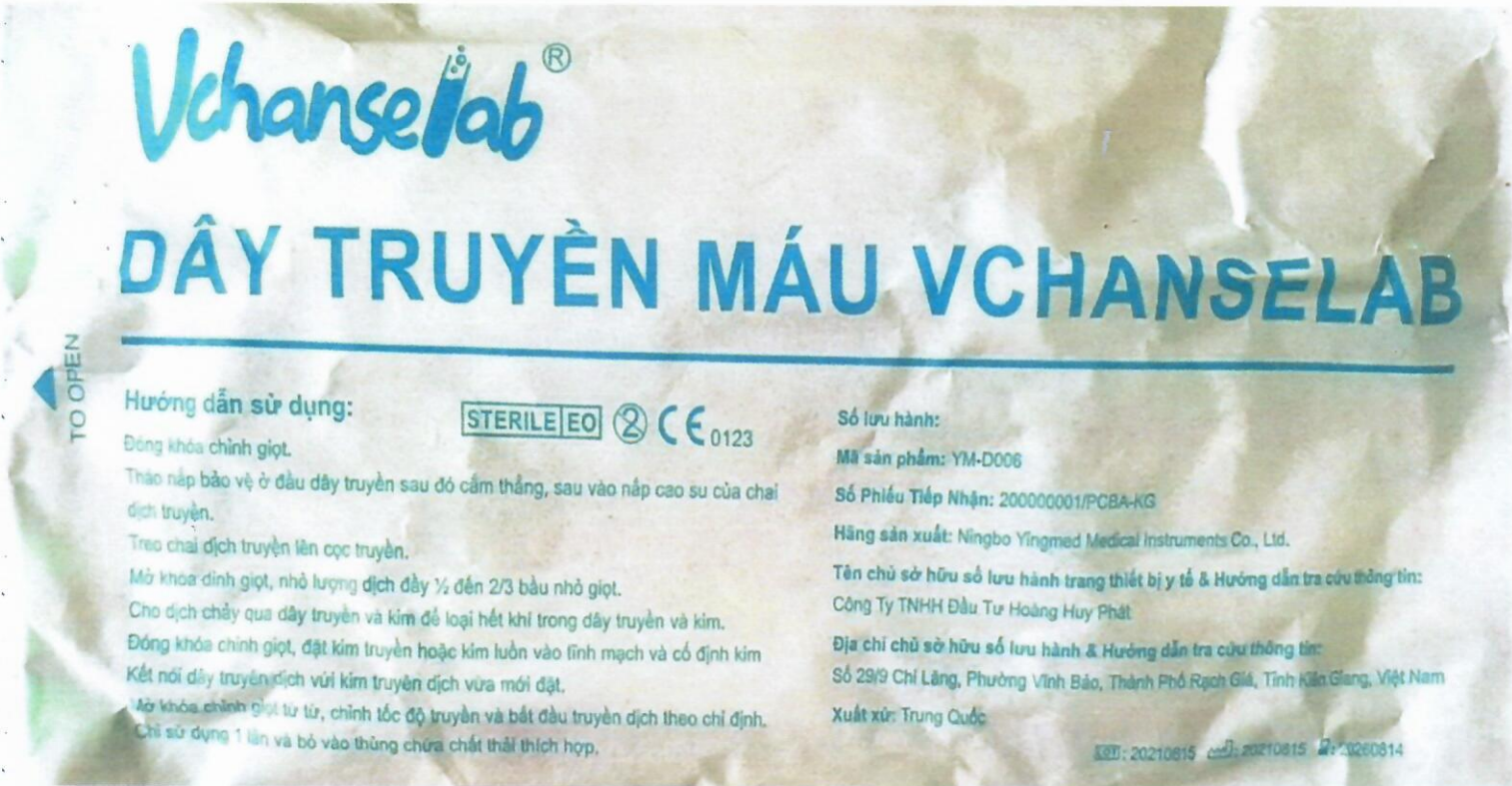

**Vchanselab<sup>®</sup>**

**DÂY TRUYỀN MÁU VCHANSELAB**

TO OPEN

**Hướng dẫn sử dụng:**

**STERILE** 0123

- Đóng khóa chỉnh giọt.
- Tháo nắp bảo vệ ở đầu dây truyền sau đó cầm thẳng, sau vào nắp cao su của chai dịch truyền.
- Treo chai dịch truyền lên cọc truyền.
- Mở khóa chỉnh giọt, nhỏ lượng dịch đầy 1/2 đến 2/3 bầu nhỏ giọt.
- Cho dịch chảy qua dây truyền và kim để loại hết khí trong dây truyền và kim.
- Đóng khóa chỉnh giọt, đặt kim truyền hoặc kim luôn vào tĩnh mạch và cố định kim.
- Kết nối dây truyền dịch với kim truyền dịch vừa mới đặt.
- Mở khóa chỉnh giọt từ từ, chỉnh tốc độ truyền và bắt đầu truyền dịch theo chỉ định.
- Chỉ sử dụng 1 lần và bỏ vào thùng chứa chất thải thích hợp.

Số lưu hành:  
Mã sản phẩm: YM-D006  
Số Phiếu Tiếp Nhận: 200000001/PCBA-KG  
Hãng sản xuất: Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd.  
Tên chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế & Hướng dẫn tra cứu thông tin:  
Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Huy Phát  
Địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành & Hướng dẫn tra cứu thông tin:  
Số 29/9 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam  
Xuất xứ: Trung Quốc

CE: 20210815 20210815 3260814