

Hướng dẫn sử dụng :

Vchanselab®

DÂY TRUYỀN MÁU VCHANSELAB

TO OPEN

Hướng dẫn sử dụng:

Đeo găng tay sạch.

Tháo nắp bảo vệ ở đầu dây truyền sau đó cầm thẳng, sau vào nắp cao su của chai lọc truyền.

Treo chai dịch truyền lên gác truyền.

Mở khóa định giọt, rút bộ lọc định dây 15 đến 20 bầu nhỏ giọt.

Cho dịch chảy qua dây truyền và kiểm soát bọt khí trong dây truyền và kim.

Đóng khóa định giọt, đặt kim truyền hoặc kim luôn vào tĩnh mạch và cố định kim.

Kết nối dây truyền dịch với kim truyền dịch vừa mới đặt.

Mở khóa định giọt từ từ, chỉnh tốc độ truyền và bắt đầu truyền dịch theo chỉ định.

Chỉ sử dụng 1 lần và bỏ vào thùng chứa chất thải thích hợp.

STERILE EO  CE 0123

Số lưu hành:

Mã sản phẩm: YM-0006

Số Phiếu Tiếp Nhận: 200000001/POBA-007

Hãng sản xuất: Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd.

Tên chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế & hướng dẫn tra cứu thông tin:

Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Huy Phát

Địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành & hướng dẫn tra cứu thông tin:

Số 23/5 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Xuất xứ: Trung Quốc

ISO: 002100-5  00210015  00210014



Nguyễn Thanh Tùng