

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

### - Công Dụng:

\* Sử dụng để ngăn chặn bụi, kháng khuẩn qua đường hô hấp.

### - Hướng dẫn sử dụng:

\* Kéo dây đeo ra, hướng mặt có màu ra phía ngoài

\* Đặt khẩu trang lên mặt, đeo dây vòng qua tai


\* Điều chỉnh nẹp mũi vừa sát khuôn mặt

\* Kéo mép dưới khẩu trang che kín cằm

\* Khẩu trang chỉ sử dụng 1 lần

- **Hướng dẫn bảo quản** : Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt. Không để gần nơi chứa các hóa chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây rách, vỡ bao bì đơn. Bảo quản ở 20°C – 35°C.

**Khuyến cáo** : Không sử dụng sản phẩm hết hạn, không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao.

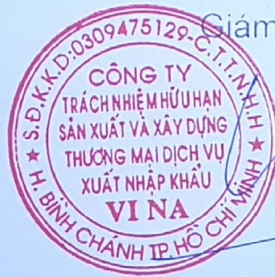

Giám Đốc Công Ty

*Phan Văn Tuấn*  
**Giám Đốc**  
*Phan Văn Tuấn*