

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên thiết bị : **KHẨU TRANG Y TẾ**  
Tên thương mại: **KHẨU TRANG Y TẾ COOP HAPPY**  
Chủng loại : **4 LỚP**

## 1. THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM :

- Khẩu trang cấu tạo gồm các lớp và các bộ phận:
  - + 03 lớp vải không dệt 100% PP, màng vi lọc Meltblown.
  - + Thanh nẹp mũi: chất liệu PE dễ uốn và giữ nguyên hình sau khi uốn.
  - + Dây đeo: chất liệu thun xốp, mềm, có độ co giãn tốt.
- Màu sắc: Trắng, xanh, xám, khác...

## 2. MỤC ĐÍCH:

Dùng để ngăn ngừa khói bụi, khí độc hại, vi khuẩn xâm nhập, ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp, chống nắng.

## 3. CÁCH SỬ DỤNG:

- Đeo hai dây quai vào tai.
- Bóp thanh nẹp mũi ôm sát mũi.
- Kéo nhẹ mép dưới ôm sát cằm.

## 4. BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt

## 5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Sản phẩm chỉ sử dụng 01 lần.

Sau khi sử dụng nên bỏ vào thùng rác có nắp đậy an toàn.

Không dùng sản phẩm hết hạn sử dụng, bao bì bị rách hoặc sản phẩm bị ẩm ướt.

## 6. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :

50 cái/hộp.

## 7. TÊN, ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT :

Tên đơn vị sản xuất: **CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN**

Địa chỉ: 4/1/8 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Thị Huyền**