



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG

- Sửa soạn cùi răng bằng mũi khoan, khi cần có thể đặt chỉ co nướu trước khi lấy dấu.
- Trợ thủ nha khoa giúp trộn hai thành phần base và catalyst của vật liệu cao su nặng putty rồi cho vào khay lấy dấu để chờ, trong kỹ thuật lấy dấu hai lần việc thực hiện lấy dấu sơ khởi và hàm đối diện được thực hiện trước. Trộn hai thành phần base và catalyst của vật liệu cao su nhẹ theo tỷ lệ và cách trộn được hướng dẫn sau đó cho vào dấu sơ khởi cao su nặng putty (kỹ thuật lấy dấu hai lần) hoặc ống bơm cao su nhẹ hoặc vật liệu được trộn tự động bằng thao tác bóp súng bơm vật liệu có đầu trộn. Chú ý khi trộn vật liệu không được sử dụng găng Latex vì sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp.
- Đưa hỗn hợp vật liệu cao su nhẹ đã được trộn lên vùng răng đã được sửa soạn rồi sau đó đặt khay lấy dấu có vật liệu cao su nặng putty đã được sửa soạn trùm lên cung răng cần lấy dấu.
- Đợi một thời gian cho đông cứng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất
- Đợi đến khi các lớp vật liệu trùng hợp hoàn toàn.
- Nhẹ nhàng gỡ khay lấy dấu ra, rửa sạch dưới vòi nước nhẹ và vô trùng bằng sản phẩm thích hợp.
- Gửi đến labo nha khoa hoặc đồ mẫu tại phòng