

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỒN RỬA TAY VÔ TRÙNG

## MODEL: ME-BRT01, ME-BRT02, ME-BRT03



Bước 1: Bật công tắc nguồn phía bên dưới ( đèn đỏ sáng ) để cấp nguồn cho thiết bị của bồn

Bước 2: Làm ướt bàn tay và cánh tay dưới vòi nước ( nước tự động xả khi đưa tay vào )

Bước 3: Đưa tay vào dưới máy xịt xả phòng tự động để lấy xả phòng rửa tay diệt khuẩn

Bước 4: Tiến hành rửa tay phẫu thuật theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế.

Bước 5: Khi không sử dụng, tắt công tắc nguồn ( đèn đỏ tối)

### LƯU Ý :

1. Điều chỉnh nước ấm bằng cách vặn nắm xoay tại núm vặn của bình nước nóng bên phía dưới của bồn
2. Trong trường hợp mất điện thì vòi và cảm biến vẫn sử dụng bình thường do hệ thống cảm biến và van từ có bin dự phòng.
3. Đồ thêm xả phòng diệt khuẩn vào máy xịt xả phòng tự động bằng cách :
  - Dùng khóa nhựa mở khóa phía bên trên vặn ngược chiều kim đồng hồ để mở lắp bảo vệ
  - Tắt công tắc nguồn máy
  - Nhấc bình chứa ra khỏi máy
  - Đồ thêm xả phòng vào bình chứa và đặt lại vị trí bình chứa vào máy như ban đầu
  - Bật công tắc nguồn, khóa vỏ bảo vệ lại để sử dụng tiếp
  - bình xịt xả phòng có thể điều chỉnh được 2 mức xịt xả phòng
    - Mức 1 : xịt 1 giọt
    - Mức 2 : xịt 2 giọt
4. Thay lõi lọc nước định kỳ 3 đến 6 tháng/ lần.