

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường số 19, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên sản phẩm: Dây truyền máu dùng cho lọc thận

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG/CHỈ ĐỊNH

- Sản phẩm này được dùng để lọc máu cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo (Có kết hợp với máy lọc thận nhân tạo).
- Bộ ống dây là phần kết nối giữa bệnh nhân với thiết bị lọc và máy lọc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

- Bộ dây truyền máu là thiết bị y tế sử dụng một lần.
- Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn ISO hiện hành.
- Các thành phần chính của sản phẩm này được làm từ nhựa PVC, PP, PC, và các vật liệu y tế khác. Ống mềm, trong suốt, trơn và không bị xoắn, đảm bảo tính thông chất lỏng tốt của ống.
- Phương pháp tiệt trùng: Tiệt trùng bằng hơi nước.
- Các bộ phận được ký hiệu theo màu thể hiện dây máu động mạch (màu đỏ) và tĩnh mạch (màu xanh)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ TÁC DỤNG PHỤ (NẾU CÓ)

Chưa phát hiện chống chỉ định hay tác dụng phụ nào khi sử dụng dây truyền máu theo chỉ dẫn.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Chỉ sử dụng 1 lần: Bỏ sau khi dùng xong
- Không sử dụng khi bao tiệt trùng bị rách hoặc có dấu hiệu hư hỏng.
- Trong suốt quá trình lọc máu, phải luôn kiểm tra để phòng tránh mọi trục trặc và sai sót của bộ dây dẫn đến nguy cơ ngưng hoạt động. Khi phát hiện có bọt khí hay các lỗi khác trong lòng ống, phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ và áp dụng các biện pháp thích hợp để khắc phục.
- Khi hút máu ra hay bơm thuốc vào ống thông qua các nút cao su, không dùng các loại kim từ cỡ 21 trở lên.
- Tránh để bộ dây bị ướt. Không để bộ dây chỗ nắng, nhiệt độ cao hay hơi ẩm thấp.
- Bộ dây này được tiệt trùng bằng hơi nước, nên vẫn có thể thấy những chấm nhỏ màu nâu sẫm hay vết móp trên mặt ống, chúng không ảnh hưởng đến chất lượng và tính năng của bộ dây.
- Gài ống bơm máu của bộ dây vào khớp bơm của máy, chỉnh áp lực bơm trên ống sao cho cột nước chuẩn đạt mức 1.5m.

TÁC DỤNG BẤT LỢI (NẾU CÓ)


Chưa phát tác dụng phụ nào khi sử dụng dây truyền máu theo chỉ dẫn.

CÁCH SỬ DỤNG

1. Lắp đặt hệ thống dây máu Động/ Tĩnh mạch



ĐỘNG MẠCH

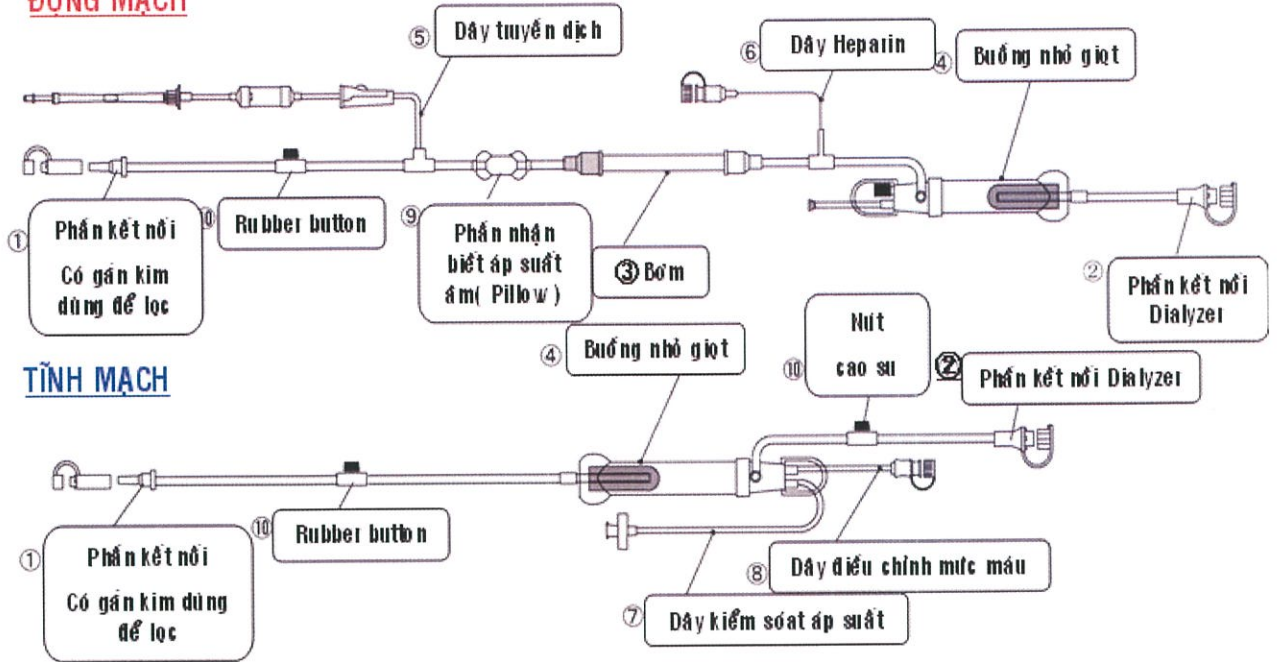

Sau khi lắp đặt xong, hãy chắc chắn rằng tất cả các kết nối đều được vặn chặt.

2. Trong quá trình điều trị

- Đảm bảo kết nối chặt chẽ dây máu và kim khi kết nối dây máu với kim.
 - Bắt đầu thực hiện việc điều trị theo hướng dẫn sử dụng máy.
 - Kiểm tra cẩn thận và thường xuyên sự rò rỉ trong khi điều trị.
 - Trong khi điều trị có chống đông bằng Heparin, hãy chắc chắn rằng kẹp đường Heparin được mở.
- ### 3. Kết thúc điều trị

Hoàn tất việc điều trị theo hướng dẫn sử dụng máy.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp sử dụng sai, xử lý không chính xác, không tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn sử dụng.

THỜI HẠN SỬ DỤNG CHO SẢN PHẨM

3 năm sau khi tiệt trùng

LƯU TRỮ, VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM

- Tránh nhiệt độ và độ ẩm cao, tránh ánh sáng trực tiếp, để nơi khô ráo, thoáng mát.
- Giữ theo phương thẳng đứng
- Xếp dỡ nhẹ tay.

Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

