

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

AMMA GEL

(Chủng loại/ Mã sản phẩm: GEL)

1. Thành phần:

Aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, nano curcumin, Ardisia silvestris Extract sorbitol, sodium saccharin, NaCMC, Xanthangum, simethicol, Chlohexidine, hương Bạc hà.

2. Mục đích sử dụng :

- Bao và bảo vệ vết loét dạ dày, tá tràng, giảm cơn đau, bỏng rát do axit gây ra trong bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng, hay dạ dày - thực quản.
- Giảm đau tức thì ngay sau khi sử dụng sản phẩm.

3. Đối tượng sử dụng:

- Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản
- Các trường hợp tăng tiết dịch vị acid gây ra các triệu chứng như nóng rát, đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua...
- Người thường xuyên uống rượu bia hoặc các chất kích thích khác, làm việc căng thẳng.

4. Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi sử dụng 1 gói/ lần ngay khi xuất hiện các triệu chứng đau, khó chịu tại dạ dày.

4. Chống chỉ định :

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

5. Cảnh báo và thận trọng :

- Tham khảo ý kiến bác sỹ khi triệu chứng kéo dài hoặc xấu hơn.
- Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và đang có con bú. Tham khảo ý kiến cán bộ y tế khi sử dụng sản phẩm.

6. Bảo quản:

- Để xa tầm tay trẻ em
- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý

Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý**

Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC

Vũ Duy Công