



Hướng dẫn sử dụng

Dùi chọc lồng ngực

STT	Chủng loại	Mã sản phẩm
1	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 8 Fr/Ch (2.7 mm) x 9" (23 cm)	8888560805
2	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 10 Fr/Ch (3.3 mm) x 9" (23 cm)	8888561019
3	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 12 Fr/Ch (4.0 mm) x 9" (23 cm)	8888561027
4	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 16 Fr/Ch (5.3 mm) x 9-8/10" (25 cm)	8888561035
5	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 20 Fr/Ch (6.7 mm) x 15-3/4" (40 cm)	8888561043
6	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 24 Fr/Ch (8.0 mm) x 15-3/4" (40 cm)	8888561050
7	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 28 Fr/Ch (9.3 mm) x 15-3/4" (40 cm)	8888561068
8	Argyle Trocar Catheter Sharp Tip 32 Fr/Ch (10.7 mm) x 15-3/4" (40 cm)	8888561076

MÔ TẢ

Dùi chọc lồng ngực là sản phẩm giúp đặt ống thông bằng dùi chọc hút.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bệnh nhân và tiêm thuốc tê tại chỗ.

Sử dụng dao mổ để rạch và xác định vị trí khoang màng phổi.

Đưa dùi chọc vào lồng ngực bằng cách sử dụng kỹ thuật trocar (dùi chọc hút) hoặc kỹ thuật tách bằng dụng cụ đầu tù để xuyên qua thành ngực.

Khâu tại chỗ.

Băng và dán băng ở vị trí đưa dùi chọc lồng ngực vào.

Gắn đầu phễu của ống thông vào hệ thống dẫn lưu.

CẢNH BÁO

Dùi chọc lồng ngực chỉ được sử dụng bởi những người đã được đào tạo về các kỹ thuật y tế phù hợp.

Các dùi chọc này được thiết kế để tương thích với thiết bị dẫn lưu lồng ngực Agyle™. Người dùng cần xác định được khả năng tương thích của sản phẩm này với các thiết bị dẫn lưu lồng ngực khác.

Không được đưa dùi chọc lồng ngực vào mà không xác định trước được đường vào khoang màng phổi.

Có khả năng đặt lệch vị trí vào phổi, dạ dày, lá lách, gan hoặc tim khi sử dụng dùi chọc lồng ngực.

Kiểm tra đảm bảo tất cả các lỗ dẫn lưu đã được đặt trong khoang ngực.

Các ống bị kẹp có thể gây tràn khí màng phổi do áp lực.

CHỈ ĐỊNH

Được chỉ định để dẫn lưu máu, không khí và dịch tiết trong các tình trạng sau: tràn khí màng phổi, chấn thương xuyên thấu ngực, tràn khí huyết màng phổi, tràn máu màng phổi, thủ thuật gây dính màng phổi, tràn dưỡng chấp màng phổi, sau phẫu thuật lồng ngực, rò phế quản-màng phổi, tràn dịch màng phổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định cho bệnh nhân khi không thể xác định được khoang màng phổi hoặc khi các cấu trúc bên dưới dính vào hoặc nằm gần thành ngực.

Chống chỉ định sản phẩm này ở những bệnh nhân nhạy cảm hoặc dị ứng với các thành phần của sản phẩm.

THẬN TRỌNG

Nên xem xét các tình trạng sau đây, trong số những tình trạng khác, trước khi đặt dùi chọc lồng ngực: rối loạn chảy máu, bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu và dính màng phổi.

Không sử dụng nếu bao bì hở hoặc hư hỏng.



Tiệt trùng bằng kỹ Ethylene oxide



Single use

Chỉ sử dụng một lần



Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Châu Âu

BẢO HÀNH

Không áp dụng do sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM

Cardinal Health 200, LLC; 3651 Birchwood Drive, Waukegan, IL USA 60085 (Hoa Kỳ).

CƠ SỞ SẢN XUẤT

Covidien; Calle 9 Sur 1113, Ciudad Industrial, Tijuana, Baja California Mexico 22444.

DFU Argyle Trocar Catheter_052022 dựa trên IFU No. TL580571 REV 09/2011