




IVD điện cực tham chiếu dùng cho xét nghiệm  
điện giải  
Chủng loại: **Convergys® ISE Ref. electrode**  
Mã hàng : 1100-1010  
Đóng gói: 1 cái/ hộp

**Convergent**  
Technologies



GIÁM ĐỐC  
*Cao Xuân Dũng*

- Mục đích sử dụng:** Dùng cho máy xét nghiệm điện giải **Convergys® ISE**
- Hướng dẫn sử dụng**
  - Đổ dung dịch **Convergys® ISE Reference Electrode filling solution** bằng 2/3 chiều cao buồng bên trong của điện cực.
  - Sau đó xoáy chặt điện cực **Ag/AgCl** (xem hình dưới), lắc điện cực cho đến khi bọt khí ra ngoài
  - Lắp vào máy đúng vị trí quy định.
  - Sử dụng serum để kích hoạt điện cực. Quá trình phải được thực hiện ở chế độ “ cảm biến”

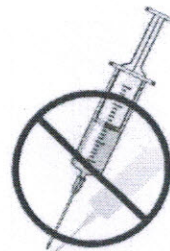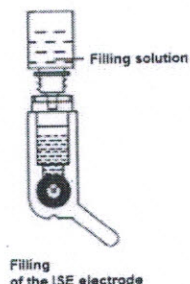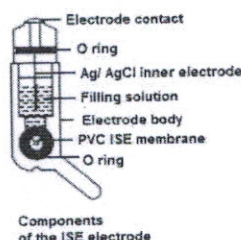

CAUTION:  
DO NOT UNSE ANY SHARP  
TOOLS LIKE NEEDLE FOR  
FILLING THE ELECTRODE.  
IT WILL DAMAGE THE  
ELECTRODE MEMBRANE!

**Chú ý:** Để điện cực trở nên ổn định có thể mất 90 phút

- Bảo trì:** Điện cực mới có thể dùng được luôn. Nếu kết quả không ổn định, sử dụng huyết tương mới thu thập để kích hoạt điện cực đến khi điện cực hoạt động ổn định (mất khoảng 30-60 phút).

Điện cực bẩn và không đủ dung dịch bên trong có thể dẫn đến kết quả sai lệch hoặc lỗi (bao gồm giá trị mV bất thường hoặc giá trị mV vượt dải). Nếu điện cực bẩn, lau sạch bằng dung dịch chuyên dụng, hoặc sử dụng tăm bông lau điện cực theo đường dọc thân điện cực. Nếu dung dịch làm đầy điện cực ít, hãy bỏ dung dịch cũ và thay bằng dung dịch mới.

#### 4. Hạn sử dụng và bảo quản:

Có thể bảo quản nhiều năm với điều kiện bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh ánh nắng mặt trời. Tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh hay đông đá. Nếu không sử dụng một thời gian dài, hãy rửa bằng nước và lau khô hoàn toàn, sau đó cất vào hộp.