



**HAPPY CARE**  
**HOA MAI CO.,LTD**

**Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế & Mỹ Phẩm Hoa Mai**

67 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

Tel: 0283.605040 Hotline: 0901.400.069/ 0916 330.213

Email: [hoa0213@gmail.com](mailto:hoa0213@gmail.com) Web: [www.hoamaimedicos.com](http://www.hoamaimedicos.com)

---

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG 01 TAY QUAY**

**Thiết bị: GIƯỜNG 01 TAY QUAY**

**Model: Chủng loại/ Mã hàng: JD-C10, C11, C12, C14, C15, C18**



**Hãng/ Nước sở hữu : [Hebei Jiede Medical Equipment Co., Ltd - Trung Quốc.](http://www.hebeijiede.com)**

### **Cách sử dụng**

Bước 1: Mở (khóa) bánh xe giường trước khi sử dụng.

Bước 2: Dùng tay quay để điều chỉnh chiều cao giường theo đúng mục đích thăm, khám.

Bước 3: Mở hoặc gập 2 thanh bảo vệ giường 2 bên theo đúng mục đích sử dụng.

Bước 4: Vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.