

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG 04 TAY QUAY**

**Thiết bị: GIƯỜNG 04 TAY QUAY**

**Model: Chũng loại/ Mã hàng: JD-C02**



**Hãng/ Nước sở hữu : [Hebei Jiede Medical Equipment Co., Ltd - Trung Quốc.](#)**

### **Cách sử dụng**

Bước 1: Mở (khóa) bánh xe giường trước khi sử dụng.

Bước 2: Dùng tay quay để điều chỉnh chiều cao giường/đầu giường/ chân giường theo đúng mục đích thăm, khám.

Bước 3: Mở hoặc gập 2 thanh bảo vệ giường 2 bên theo đúng mục đích sử dụng.

Bước 4: Vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.