

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Xịt mũi trẻ em CTMOM NANO BABY

#### 1. Thành phần:

Natri clorid 0.9%, Nano Bạc 0.2%, Benzalkonium clorid 0.007%, Propylen glycol, nước tinh khiết vừa đủ.

#### 2. Công dụng:

- Sử dụng hàng ngày để vệ sinh mũi, loại bỏ chất nhầy, bụi bẩn đọng lại ở xoang, mũi, giúp thông thoáng mũi, dễ thở, mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng.
- Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh về tai mũi như: nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm tắc mũi, viêm xoang.

#### 3. Đối tượng sử dụng:

Phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ em: Sử dụng sản phẩm để vệ sinh mũi hàng ngày và ngăn ngừa các bệnh tai mũi họng. Hỗ trợ điều trị các bệnh về mũi.

#### 4. Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Đưa đầu vòi phun vào từng bên mũi

Bước 2: Nhấn nhẹ, dứt khoát đầu vòi để xịt dung dịch vào khoang mũi, xịt đủ thể tích để dung dịch kéo theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài.

Bước 3: Lau sạch đầu vòi ngay khi sử dụng:

- Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi đang có các bệnh lý về mũi.
- Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và ngăn ngừa các bệnh về mũi

#### 5. Chống chỉ định: không đề cập.

#### 6. Cảnh báo thận trọng: Không có

7. Quy cách đóng gói: ống/ lọ: 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 70ml, 75ml, 100ml, 120ml, 150ml.

#### 8. Điều kiện bảo quản, hạn dùng:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

#### 9. Cơ sở sản xuất

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương



Địa chỉ:Lô CN3, cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**10. Cơ sở sở phân phối:**

Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế CT Pharma

Địa chỉ: 101/30 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

CN CÔNG TY CP DP SYNTECH  
NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG



**GIÁM ĐỐC**  
**DS.NGUYỄN XUÂN TRĂNG**

