

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Phương



DIA PATH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CytoPath Filters Non Gyn 100 pcs

IVD lọc mẫu tế bào không phải tế bào phụ khoa

Bộ lọc dùng trong chuẩn bị lớp tế bào học mỏng của mẫu tế bào không phải tế bào phụ khoa

Mã sản phẩm	Quy cách đóng gói
CP202	Khay 100 cái

Mục đích sử dụng

Bộ lọc dùng trong chuẩn bị lớp tế bào học mỏng của mẫu tế bào không phải tế bào phụ khoa.

Sản phẩm dùng trong chẩn đoán *in vitro*.

Mô tả sản phẩm

Bộ lọc dùng một lần làm bằng vật liệu trơ chuyên dụng để chuẩn bị các mẫu tế bào học nhuộm dịch.

Thành phần

Bộ lọc hình trụ màu xanh lam bằng chất đồng trùng hợp acrylonitrile-styren.

Đặc tính

Kích thước bộ lọc (chiều cao)	5,5 cm
Kích thước màng lọc	2 cm
Kích thước lỗ màng lọc	5 μ m

Cảnh báo: Không chạm tay vào màng. Không để bao bì của bộ lọc mở để tránh tiếp xúc với bụi bẩn.

Hướng dẫn sử dụng

Non Gyn filters được thiết kế để sử dụng một lần với các thiết bị tự động hoặc bán tự động để chuẩn bị lớp tế bào mỏng của các mẫu tế bào học nhuộm dịch. Mẫu tế bào học được thu thập rồi cho vào dung dịch CytoPath Collection and Washing Solution, sau đó, được lọc qua bộ lọc để khôi phục các tế bào bên trong dung dịch đó.

Để tránh sai sót, sản phẩm nên được sử dụng bởi nhân viên có trình độ và đã qua đào tạo. Sản phẩm cần được sử dụng bởi cán bộ có chuyên môn. Các hướng dẫn về an toàn tại nơi làm việc phải được áp dụng theo các quy định hiện hành. Các công cụ được sử dụng trong chẩn đoán phải phù hợp để sử dụng chẩn đoán trong phòng xét nghiệm. Chỉ những nhân viên được ủy quyền, được đào tạo và có năng lực mới được thực hiện chẩn đoán.

Kiểm soát chất lượng

Các sản phẩm và nguyên liệu thô được nhập và giám sát liên tục bằng hệ thống máy tính cho phép truy xuất giữa số lô của từng sản phẩm và số lô nguyên liệu thô của chúng.



DIAPATH

Bảo quản

Bảo quản sản phẩm theo các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn. Sản phẩm nếu được bảo quản theo khuyến cáo và còn nguyên bao gói sẽ ổn định đến hết thời hạn sử dụng được ghi trên nhãn. Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn.

Nếu sản phẩm không được bảo quản theo khuyến cáo, hiệu năng của sản phẩm có thể thay đổi và phải được xác nhận lại bởi người dùng. Sau khi mở nắp, hóa chất chỉ ổn định cho đến ngày hết hạn nếu được bảo quản bên trong lọ và theo các khuyến cáo được ghi trên nhãn. Khuyến cáo đóng chặt lọ sau khi sử dụng.

Hướng dẫn thải bỏ

Sản phẩm đã hết hạn sử dụng và/hoặc không sử dụng phải được xử lý theo quy định về quản lý chất thải của địa phương, dựa trên phân loại nguy cơ trên nhãn và sau khi đánh giá khả năng lây nhiễm. Trong một số trường hợp, có thể cần đánh giá phân tích để xác định chính xác loại chất thải và mức độ nguy hiểm.

Chú giải các biểu tượng trên nhãn



Số lô



Chủ sở hữu sản phẩm



Nhiệt độ bảo quản



Mã sản phẩm



Hạn dùng



Thiết bị y tế dùng trong chẩn đoán *in vitro*



Nhạy cảm với ánh sáng

Để biết thêm thông tin, tham khảo bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS).

Cơ sở sản xuất/ Chủ sở hữu sản phẩm: DIAPATH S.p.A.

Địa chỉ: Via Savoldini, 71 – 24057 Martinengo (BG) – Italy