



Nano bạc (Colloidal Silver solution) 2500ppm (nhập khẩu Argenol -Tây Ban Nha), Tinh dầu bưởi, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sorpitol, nước tinh khiết vừa đủ.

Dung dịch vệ sinh mũi họng và răng miệng Silver Nano có thành phần chính là Nano bạc (Colloidal Silver solution) - Là sản phẩm của công nghệ mới có tính đột phá, hỗ trợ ngừa khuẩn kháng viêm hiệu quả. Sản phẩm không gây kích ứng và an toàn cho người sử dụng, là lựa chọn lý tưởng cho việc chăm sóc, vệ sinh mũi họng và răng miệng.

CÔNG DỤNG

Vệ sinh hàng ngày để làm sạch và thông mũi, họng, vệ sinh răng miệng.

Ngăn ngừa sổ mũi, ngạt mũi, viêm mũi dị ứng, khô khè, khô rát mũi họng, viêm xoang, nhiệt miệng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, thay đổi thời tiết, để ngăn ngừa viêm mũi, xoang, ngạt mũi, sổ mũi, khô rát mũi, họng, răng miệng.

Người bị ngạt mũi, sổ mũi, khô rát mũi, họng do viêm mũi, xoang, viêm lợi, nhiệt miệng.

Dùng được cho người lớn và an toàn cho trẻ nhỏ.

Có thể sử dụng trong thời gian lâu dài.

CÁCH DÙNG

Xịt 3-4 lần mỗi ngày, hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.

Vệ sinh mũi:

- Lắc nhẹ bình xịt, nhấn nút xịt, thiết bị xịt sẽ phun dung dịch dưới dạng sương vào sâu trong khoang mũi

- Ấn nhanh đầu phun từ 2 - 3 lần mỗi bên mũi, nếu hít mạnh theo nhịp phun sẽ giúp tăng hiệu quả.

- Để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài và hỷ mũi.

- Lau sạch vòi phun và đặt nắp bảo vệ.

Vệ sinh họng và răng miệng:

- Xịt trực tiếp vào quanh miệng, hoặc vào sâu trong miệng, hay xịt vào chỗ vết lở miệng.

BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.

Chú ý: sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA

Đ/C: 62 ngõ 897 Giải Phóng, Giáp Bát, HM, HN

Điện thoại: 024 77733933

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH SX CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT

Đ/C: Khu công nghiệp Thanh Liêm, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.