

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Công ty TNHH BMACARE

Số nhà 136, Tổ dân phố 6, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tên sản phẩm: **Hóa chất thử nghiệm miễn cảm kháng sinh – Dạng khoan giấy kháng sinh VETMultodisc**

**Bao gồm: VET Gram-positive, VET Gram – negative**

### Hướng dẫn sử dụng:

1. Lấy 1 khoan từ tủ lạnh bỏ ra ngoài để cân bằng với nhiệt độ phòng (khoảng 30 phút).

Điều này sẽ ngăn chặn độ ẩm trên các đĩa, tác nhân gây hại đến sự ổn định chất lượng sản phẩm khi mở gói ra.

2. Sử dụng dịch nuôi cấy mới, tinh khiết, chuẩn bị huyền phù của sinh vật thử nghiệm để đạt được tiêu chuẩn độ đục 0,5 McFarland.

3. Dùng tăm bông vô trùng phết hỗn dịch đã điều chỉnh lên bề mặt đã làm khô của môi trường đĩa thích hợp, ví dụ thạch Mueller Hinton.

4. Dán chặt vòng vào đĩa thạch đã cấy, đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt thạch.

5. Lật ngược đĩa và ủ các đĩa trong điều kiện không khí ở  $35 \pm 2^\circ \text{C}$  trong 16-20 giờ. Nếu các thử nghiệm được thực hiện đối với các sinh vật khó tính, có thể yêu cầu các điều kiện ủ khác nhau.

Tuân theo quy tắc 15-15-15 phút: Sử dụng huyền phù dịch cấy trong vòng 15 phút sau khi chuẩn bị, áp dụng đĩa trong vòng 15 phút sau khi cấy và ủ đĩa trong vòng 15 phút sau khi áp dụng đĩa.

### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Khi kết thúc thời gian ủ, đo đường kính của các vùng ức chế, bao gồm cả đường kính của đĩa và giải thích theo các tiêu chuẩn tham chiếu hiện hành.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BMACARE



GIÁM ĐỐC

*Dương Thị Phương Thảo*