

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Bộ mũi khoan phẫu thuật dùng trong nha khoa (the osseodensification Burs kit)

Mục đích/Chỉ định sử dụng ghi trên nhãn:

Dùng để khoan tạo ren để đặt trụ chân răng nhân tạo (Implant) trên xương hàm của Bệnh Nhân.

Hướng dẫn sử dụng:

Các bước thực hiện:

Trước khi sử dụng vệ sinh sạch sẽ các mũi khoan, bộ mũi khoan bọc kỹ với vải sạch, hấp tiệt trùng với máy hấp chuyên dụng cho Nha Khoa

Khoan từng mũi khoan từ nhỏ đến lớn theo kích thước của chân răng nhân tạo (Implant), trong quá trình khoan phải đảm bảo có tia nước tại mũi khoan tránh cháy xương, dùng thước hoặc dụng cụ đo (pin) để đo kích thước chiều sâu mũi khoan tại vùng xương bị mất răng, đảm bảo phù hợp với kích thước implant, hướng khớp cắn của bệnh nhân, xem xét kích thước trong catalogue và trên phim CT 3D đã phân tích của Bệnh Nhân, để chế độ trên máy khoan 1200 vòng/phút tùy vào vùng xương cứng hay xốp.

Chống chỉ định:

Không có chống chỉ định đặc biệt.

Cảnh báo và thận trọng:

Phải do bác sỹ nha khoa hoặc bởi nha sĩ chuyên khoa răng hàm mặt sử dụng.

Sử dụng đúng chế độ khi dùng máy đặt implant cho tay khoan. Đảm bảo chế độ trên máy khoan 1200 vòng/ phút, tránh quá lực.

Khoan đúng vị trí mất răng để việc đặt implant được an toàn không ảnh hưởng đến dây thần kinh hàm dưới và màng xoang hàm trên.

Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra:

Nếu không dùng lực phù hợp theo khuyến cáo của hãng có thể làm cháy xương tại vùng phẫu thuật gây tiêu xương và chân răng nhân tạo thiếu cứng chắc và thiếu sự ổn định khi được đặt vào vị trí mất răng trên xương hàm.

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:

- Tính an toàn cao, tương thích với cơ thể người.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

LUU Ý:

Sử dụng đúng mục đích, công dụng của dụng cụ.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng con dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hùng