

Hướng dẫn sử dụng SQA Sperm Quality Analyzer Capillary Compartment Cleaning Kit cho máy SQA and QwikCheck

Quy trình vệ sinh SQA được cập nhật để thuận tiện cho việc bảo trì và độ tin cậy của hệ thống. Vệ sinh không đúng cách hoặc quá mức với số lượng nhiều hơn 1 giọt chất lỏng có thể có tác động đến hệ thống. Vui lòng xem quy trình mới khác với các phiên bản trước theo 3 cách dưới đây:

- Sử dụng chổi tĩnh điện bằng gỗ kích thước 6” “chổi dài” là Bước 1 và có thể thực hiện hàng ngày.
- Sử dụng dụng cụ hình mác chèo khác là Bước 2 để thực hiện hàng tuần (thay vì hàng ngày)
- Bộ dụng cụ mới sẽ gồm các hướng dẫn cập nhật và sẽ có nhãn bên ngoài chỉ ra đây là bộ dụng cụ mới.

Khi vệ sinh Hàng ngày (bước 1), Hàng tuần (bước 2)

- Hoặc khi tự kiểm tra hoặc khi có bất kỳ lỗi nào phát sinh
 - Hoặc khi hệ thống bị nhiễm bẩn bởi tinh trùng
- Thành phần của bộ dụng cụ vệ sinh:

- Chổi vệ sinh dài
- Capillary vệ sinh có chấm xanh
- Capillary có miếng bọt biển làm khô
- Dung dịch vệ sinh

Vệ sinh: Bước 1 (Hàng ngày)

1. Cài chổi dài (mặt có lông cứng hướng xuống dưới) vào khu vực phía trên của buồng ở dưới của hệ thống tương tự như với capillary kiểm tra (Hình 1)
2. Kéo chổi ra bằng lực hướng xuống dưới để quét hoặc “đuổi bụi” ra khỏi mắt đọc (cảm nhận được một “ngăn” trong khu vực phía dưới/phía trên của buồng) – (Hình 2 và 3).
3. Giám sát hệ thống thông số “REF.2”. Nó có thể nằm giữa khoảng 2.800 và 3.200 mV.

Vệ sinh: Bước 2 (Hàng tuần)

1. Lựa chọn capillary vệ sinh có chấm xanh (Hình 4)
 - Làm ẩm bằng một giọt dung dịch vệ sinh
 - Giữ sạch phần dung dịch thừa
 - Cài vào khoang đo với chấm xanh và mặt xơ quay xuống dưới (Hình 5)
 - Đưa capillary vệ sinh ra và vào 3 lần
 2. Cài capillary làm khô có gắn miếng bọt biển vào buồng kiểm tra và để trong 10 giây (Hình 6)
- LƯU Ý:** Không di chuyển capillary làm khô ra vào.



Hình 1. Chổi vệ sinh



Hình 2. Khoang phía dưới



Hình 3. Phùi bụi



Hình 4. Capillary vệ sinh có chấm xanh và mặt xơ



Hình 5. Cài vào khoang đo



Hình 6. Capillary làm khô được gắn bọt biển



www.mes-global.com

SQA-V and QwikCheck™ GOLD Cleaning_28_MAY_14