



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thịnh

Xịt Mũi
Eurovit
Xuyên Tâm Liên • Kim Ngân Hoa
Nano Bạc • Eucalyptol

Xịt Mũi

Eurovit

Xuyên Tâm Liên • Kim Ngân Hoa
Nano Bạc • Eucalyptol

ANTIVIRAL NASAL SPRAY

THÀNH PHẦN:

Natri chloride, Xuyên Tâm Liên, Hoa ngũ sắc, Kim Ngân Hoa, Menthol, Tinh dầu tràm, Tinh dầu bạc hà, Nano Bạc, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerine, Benzalkonium chloride, Acid citric, Nước RO.

Xịt Mũi

Eurovit

Xuyên Tâm Liên • Kim Ngân Hoa
Nano Bạc • Eucalyptol

ANTIVIRAL NASAL SPRAY

CÁCH DÙNG:

Bước 1: Mở nắp đầu xịt, cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, xịt vào không khí 1-2 nhát để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt.
Bước 2: Hướng đầu xịt thẳng vào mũi, hơi ngửa cổ ra sau, nhấn đầu xịt, hít nhẹ để dung dịch đi sâu vào khoang mũi. Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 3-4 lần. Dùng xong vệ sinh và đậy nắp đầu xịt.

CHỈ ĐỊNH:

- Giúp hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập vào vùng mũi họng, làm sạch mũi, loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy, giúp làm sạch niêm mạc mũi, thông mũi.
- Hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, viêm mũi, họng, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng.

Flu prevention, rhinitis, pharyngitis, sinusitis, runny nose, stuffy nose, runny nose allergic rhinitis.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Trẻ em và Người lớn bị cảm cúm, viêm mũi, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng.

*Cảnh báo và thận trọng:
Không sử dụng với người mắc cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.*

Tiêu chuẩn: MED.TTBYT/2022/16
Số CB:

Phòng ngừa cảm cúm, viêm mũi, họng, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng.



Xịt Mũi
Eurovit



Xịt Mũi
Eurovit

30ml



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH MEDISTAR VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỐ 1
Địa Chỉ: Lô 38-2, Khu Công Nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

30ml



Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
SĐT: 0984752961
Tư vấn sản phẩm: 0389999735



Expiry Date:
Mfg Date:
Batch No :

kt: 45x35x120mm