



**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**  
THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG - THÁI NGUYÊN - VIỆT NAM  
MEINFA JOINT STOCK COMPANY  
SONGCONG CITY – THAINGUYEN PROVINCE – VIETNAM  
Tel: 84 208 3861236 - Fax: 84 208 3861338  
Email: [meinfa2006@gmail.com](mailto:meinfa2006@gmail.com)

---

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

### **HỌ DỤNG CỤ KHÁM, PHẪU THUẬT INOX**

#### **\* SỬ DỤNG:**

- Dùng để khám, chữa, phẫu thuật trong quá trình thăm, khám, điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
- Các sản phẩm cần đảm bảo phải được tiệt trùng, khử khuẩn trước khi sử dụng.

#### **\* BẢO QUẢN:**

- Các dụng cụ cần được tiệt khuẩn và làm sạch ngay sau khi dùng bằng hơi nước nóng hoặc hóa chất chuyên dụng. Hấp ở nhiệt độ tối đa 140 độ C, sấy ở nhiệt độ tối đa 180 độ C.
- Không được đốt khử trùng.
- Các dụng cụ có ốc vít, cần kiểm tra độ rơ, lỏng, chỉnh vít trước khi sử dụng sản phẩm.
- Tránh va đập mạnh gây biến dạng sản phẩm.

CÔNG TY CP MEINFA



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*KS. Trần Văn Hưng*