

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐEO KHẨU TRANG Y TẾ

Đeo khẩu trang y tế đúng cách

Khẩu trang y tế chỉ sử dụng một lần,
không sử dụng lại khẩu trang y tế dùng một lần

1 LẦN



Đeo mặt màu (xanh/xám) ra ngoài, mặt trắng vào trong,
kẹp nhôm hướng lên trên.
Kéo khẩu trang che kín cả mũi lẫn miệng, ấn kẹp nhôm
ôm sát vào phần sống mũi

Trong quá trình đeo khẩu trang, tuyệt đối không
dùng tay chạm vào mặt trước khẩu trang



Khi tháo khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai
để tháo khẩu trang, tránh dùng tay cầm vào mặt trước
của khẩu trang để tháo ra.
Sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng rác có nắp đậy

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Lê Uyên Thành

Mẫu số 01

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ trang thiết bị và công trình y tế)

Tên cơ sở lưu hành trang thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAIKA

Địa chỉ: Thửa đất số 114, tờ bản đồ số 04, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Ngày 31 tháng 5 năm 2022

Stt	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: KHẨU TRANG Y TẾ MAIKA Chung loại: 3 LỚP	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Khẩu trang y tế gồm các bộ phận: - Các lớp vải: 2 lớp vải không dệt (lớp 1 và lớp 3) dạng phẳng có gập nếp; - Lớp vi lọc; 1 lớp (lớp 2); - Thanh nẹp mũi; - Dây đeo - Màu sắc: Xanh, Trắng, Xám, Hồng hoặc theo yêu cầu của khách hàng; - Kích thước: (đối với người lớn) Chiều dài: 17.0 cm (cộng ,trừ 10%) Chiều dài: 9.0 cm (cộng ,trừ 10%)
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	-Không có linh kiện và phụ kiện đính kèm
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	- Sử dụng để bịt vùng mặt (mũi và miệng) để ngăn ngừa khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây lan qua đường hô hấp. - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Bước 1: Kéo khẩu trang sang 2 bên - Bước 2: Đeo dây quai qua tai - Bước 3: Định hình thanh nẹp mũi
1.5	Chống chỉ định	- Không ghi nhận
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Không ghi nhận - Không nên đeo khẩu trang quá lỏng hoặc quá chặt - Khẩu trang dùng một lần - Không sử dụng sản phẩm với mục đích khác



Stt	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Không ghi nhận
2.	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	chưa đăng ký
3.	Chi định đăng ký ở các nước khác (nếu có):	chưa đăng ký
4.	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:	Hiện không ghi nhận

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Lê Uyên Khanh

