


**HSDS LƯU LƯỢNG KẾ**  
**Hãng SX: HERSILL – TÂY BAN NHA**

Bước 1	Kết nối lưu lượng kế với nguồn khí trung tâm
Bước 2	Kết nối bình làm ẩm (đã có nước) với lưu lượng kế
Bước 3	Điều chỉnh lưu lượng kế theo chỉ định của bác sĩ
Bước 4	Kết nối mask thở/ canula với bệnh nhân
Bước 5	Kết nối ống dẫn khí với mask thở/ canula
Bước 6	Kết nối ống dẫn khí với lưu lượng kế
Bước 7	Kiểm tra lại lưu lượng thở trên lưu lượng kế 1 lần nữa đúng với chỉ định của bác sĩ

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

  
**Giám Đốc**  
**KS. ĐỖ ĐĂNG CƯỜNG**