


IVD nước rửa dùng cho xét nghiệm huyết học
Chủng loại: Convergys® Hypoclean CC
Mã hàng : 1100-1704
Đóng gói: 100ml

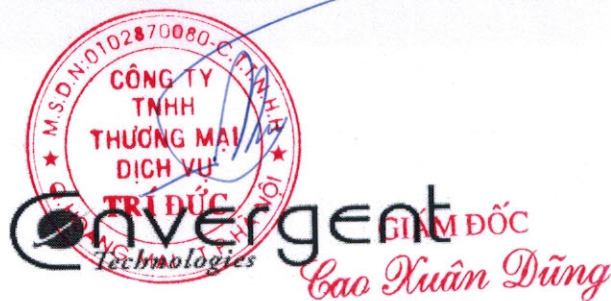

REF 1100-1704	Convergys® HypocleanCC	1L
LOT 8010350114	Cho Convergys® X5	Thành phần chính:
2015-07	Làm sạch và tẩy trắng cô đặc cho máy đếm tế bào máu	Chất tẩy rửa < 1.0%
+15°C		Sodium hypochlorite < 5.0%
+30°C		Sodium hydroxide < 0.5%
		Chất ổn định: < 0.5%
		H315 gây kích ứng da
		H319 gây kích ứng mắt nghiêm trọng
		P305 + P351 + P338
 Convergent Technologies GmbH & Co. KG Ringstraße 14 D-35091 Coelbe - Germany		
		Warning
www.convergent-technologies.de		CTX5H_20140417Ver003

1. Mục đích sử dụng:

Là dung dịch hypochlorite kiềm để làm sạch oxy hóa chuyên sâu các mao mạch, đường ống và các buồng của máy phân tích huyết học, nhằm loại bỏ kết tủa thành phần máu và cặn lipoprotein.

2. Thành phần/ Dữ liệu về thành phần:

Tên thành phần	Số CAS	Nồng độ (m/m)	Biểu tượng	Nguy hiểm
Dung dịch Sodium hypochlorite	1310-73-2	< 5.0 %	 GHS07	H315 H319

Convergent Technologies GmbH & Co. KG

Văn phòng đăng ký: Ringstrasse 14, 35091 Cölbe, Germany
Tel: +49 6421 8869948 Fax: +49 6421 8869958
Trang chủ: www.convergent-technologies.de
e-mail: info@convergent-technologies.de

Ust-Id: DE 241291597
Steuernummer: 031 310 30121
Amtsgericht Marburg HRA 4125
Geschäftsführer: Umesh Bhalla

Ngân hàng Volksbank Main-Tauber eG, Tauberbischofsheim, Germany

Tài khoản EURO
Account No. 67131401
IBAN DE66 6739 0000 0067 1314 01
BIC GENODE61WTH
SWIFT GENODEFF

Tài khoản USD
Account No. 567131408
IBAN DE97 6739 0000 0567 1314 08
BIC GENODE61WTH
SWIFT GENODEFF

REV006

IVD nước rửa dùng cho xét nghiệm huyết học
Chủng loại: **Convergys® Hypoclean CC**
Mã hàng : 1100-1704
Đóng gói: 100ml



Cảnh báo

3. Thận trọng và bảo quản:

Dung dịch **Convergys® Hypoclean CC** được sản xuất chỉ cho mục đích sử dụng trong phòng xét nghiệm chuyên nghiệp. Cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thông thường trong phòng xét nghiệm. Các cảnh báo **Convergys® Hypoclean CC** có thể vận chuyển và bảo quản ở nơi khô ráo ở nhiệt độ từ 15-30°C.

4. Cài đặt hóa chất:

Convergys® Hypoclean CC phải được cài đặt bởi người có chuyên môn trên Máy phân tích huyết học tự động **Convergys® X5** theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng Máy phân tích.

5. Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật trên trang web
<http://www.convergenttechnologies.de/support/>

6. Được sản xuất bởi: **Convergent Technologies GmbH & Co. KG,**
Ringstrasse 14, 35091 coelbe, Germany



Convergent Technologies GmbH & Co. KG

Văn phòng đăng ký: Ringstrasse 14, 35091 Cölbe, Germany
Tel: +49 6421 8869948 Fax: +49 6421 8869958
Trang chủ: www.convergent-technologies.de
e-mail: info@convergent-technologies.de

Ust-Id: DE 241291597
Steuernummer: 031 310 30121
Amtsgericht Marburg HRA 4125
Geschäftsführer: Umesh Bhalla

Ngân hàng Volksbank Main-Tauber eG, Tauberbischofsheim, Germany

Tài khoản EURO

Account No. 67131401
IBAN DE66 6739 0000 0067 1314 01
BIC GENODE61WTH
SWIFT GENODEFF

Tài khoản USD

Account No. 567131408
IBAN DE97 6739 0000 0567 1314 08
BIC GENODE61WTH
SWIFT GENODEFF

REV006