

ĐÈN SOI ĐÁY MẮT TRỰC TIẾP

Mã sản phẩm: 1102-P-1105 ; 1102-P-1092

Hãng SX: Keeler

Hướng Dẫn Sử Dụng

Khi ĐÈN SOI ĐÁY MẮT TRỰC TIẾP được sử dụng, các bước bật và tắt máy được tuân theo sự hướng dẫn sau.

Việc bật hoặc tắt máy không đúng quy trình có thể gây hư hỏng thiết bị.

Bật máy

1. Kiểm tra xem đèn đã được lắp pin ↓ chưa.
2. Bật đèn bằng cách vặn bánh lăn phía trên tray cầm từ từ theo chiều kim ↓ đồng hồ để kiểm tra năng lượng pin còn hay hết.
3. Soi đèn vào mắt bệnh nhân để thăm ↓ khám.
4. Sạc pin lần đầu: Sạc liên tục trong 08 tiếng đồng hồ trong 3 lần sạc đầu tiên. Khi sạc, đèn màu cam nhấp nháy là báo hiệu pin sắp đầy. Đèn cam sáng hẳn là báo hiệu pin đã đầy.

Tắt máy

1. Vặn bánh lăn phía trên tay cầm từ từ theo ngược chiều kim đồng hồ ↓ để tắt đèn.
2. Nhẹ nhàng đặt đèn vào hộp đựng sau khi sử dụng.

! CẢNH BÁO

- Luôn luôn thực hiện đúng theo các trình tự bật và tắt máy

❖ Nếu trong quá trình sử dụng có gặp sự cố, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật – 028. 62908200

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Warut Pangpomma