

# Blood collection using the S-Monovette®


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 1. Sự chuẩn bị

Dán mã vạch lên ống đựng mẫu máu



- Khử trùng vùng lấy máu

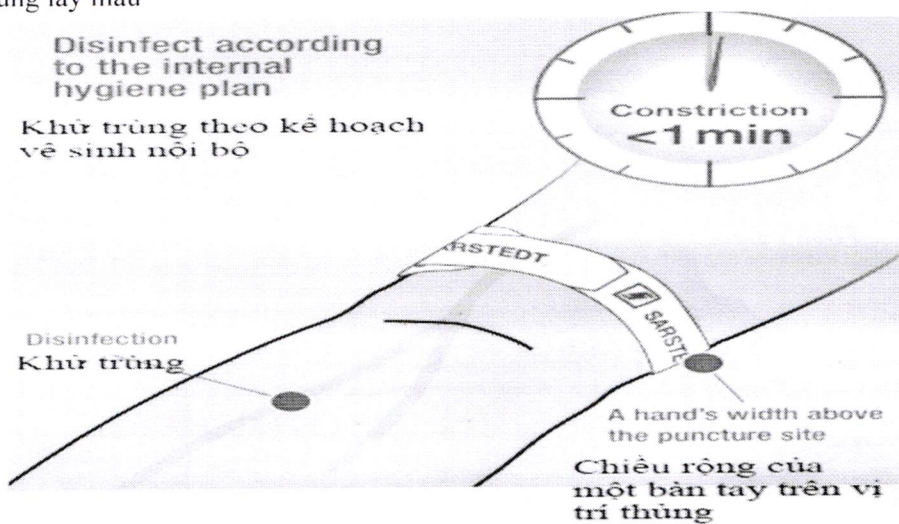

- Lựa chọn phương pháp lấy máu

| Theo Gurr ①   | Theo CLSI ②  |
|---|--|
| Cấy máu   | Cấy máu  |
| Huyết thanh / huyết thanh-gel máu   | máu Citrate  |
| máu Citrate   | Huyết thanh / huyết thanh-gel máu                    |
| Heparin / máu heparingel  | Heparin / máu heparingel                             |
| EDTA máu  | EDTA máu   |
| máu florua / xitrat-florua (S-Monovette® GlucoEXACT)  | máu florua / xitrat-florua (S-Monovette® GlucoEXACT) |
| ① Gurr và cộng sự “Must hieuardarbeitsanweisung Präanalytik” J Lab Med 2011<br>② CLSI GP41 Quy trình lấy mẫu máu chẩn đoán bằng phương pháp chọc hút tĩnh mạch, Hướng dẫn đã được phê duyệt |  |