

ASP[™]

REF

82010 / 82016 / 82027

82032 / 82076

CIDEX[™]

Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.

33 Technology Drive, Irvine, CA 92618, USA

+1(888)-STERRAD  www.asp.com



EC REP

ASP, The Netherlands BV

BIC 1, 5657 BX, Eindhoven, The Netherlands

Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ

vi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tham khảo hướng dẫn sử dụng và biện pháp phòng ngừa của nhà sản xuất để ngâm, làm sạch hoặc dung dịch khử khuẩn.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Các hệ thống khay dụng cụ CIDEX được sử dụng để chứa dịch làm sạch và khử khuẩn để làm sạch trước và khử khuẩn các dụng cụ y tế tái sử dụng.

VỆ SINH

Trước khi sử dụng khay cho lần đầu tiên, hoặc khi thay đổi dung dịch, rửa kỹ (sử dụng chất tẩy nhẹ) và xả lại khay thật kỹ. Luôn tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy rửa.

- Khay có thể được phơi khô, hoặc lau khô bằng vải không xơ.
- Khi khay hoàn toàn khô mới được đổ dung dịch mới vào khay.



CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Ngừng sử dụng Khay CIDEX khi chúng bị nứt hoặc hư hỏng theo bất kỳ cách nào để tránh rò dung dịch bị chảy ra ngoài.

Tất cả các nhân viên sử dụng Khay CIDEX cần tuân thủ Các Biện Pháp Phòng Ngừa Chuẩn và mặc trang phục bảo hộ các nhân (PPE) theo quy định của các cơ sở y tế hoặc bệnh viện.

Nhân có thể tái sử dụng để xác định các vật dụng, thành phần trong khay được cung cấp để quý vị dễ sử dụng.

THẢI BỎ

Sản phẩm có thể được thải bỏ theo quy định của Quốc gia, Liên bang, Bang hoặc Địa phương hoặc theo quy trình và chính sách của cơ sở y tế.

Để biết thêm bảng chú giải thuật ngữ được sử dụng, hãy truy cập eifu.asp.com.