

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DUNG DỊCH XỊT MŨI

(Chủng loại/ Mã sản phẩm: XỊT MŨI KOTAC)

## 1. Thành phần:

Benzalkonium chloride, Acid hyaluronic, Xylometazoline Hydrochloride 0,05% , Natri clorid, nước tinh khiết.

## 2. Mục đích sử dụng :

- Vệ sinh mũi, loại bỏ dị vật, chất nhày, giúp làm sạch và thông thoáng đường thở.
- Làm giảm sung huyết mũi và làm giảm các chứng ngạt mũi, giảm tiết dịch xoang mũi, giảm kích ứng xoang mũi ở người mắc bệnh viêm mũi dị ứng cấp và theo mùa, bệnh viêm mũi, viêm xoang, cảm cúm, cảm lạnh.
- Hỗ trợ làm ẩm khoang mũi, hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm thông mũi, phòng ngừa viêm mũi.

## 3. Cách dùng:

Xịt vào mỗi bên lỗ mũi khi bị sổ mũi, nghẹt mũi, khó thở hàng ngày. Hoặc theo hướng dẫn của Bác sĩ, Dược sĩ.

Vệ sinh sạch mũi. Mở nắp sản phẩm nhấn xịt dứt khoát đồng thời hít nhẹ để dịch chảy đều và đi sâu vào trong khoang mũi. Đậy nắp sản phẩm khi xong.

## Đối tượng sử dụng:

- Trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi: xịt vào mũi một nhát xịt, ngày từ 1 đến 2 lần.
- Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn: Xịt mỗi lỗ mũi 1 đến 2 nhát xịt, ngày 2 đến 3 lần.

## Chống chỉ định :

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm,
- Người có tiền sử mẫn cảm với các thuốc adrenergic.
- Người đang dùng các thuốc chống trầm cảm 3 vòng
- Người bệnh bị tăng nhãn áp Glacom (thiên đầu thống)
- Phụ nữ có thai, đang cho con bú và trẻ em dưới 2 tuổi.

## Thận trọng :

- Thận trọng với những người bị bệnh mạch vành, đau thắt ngực hoặc tăng huyết áp, người đái tháo đường, cường tuyến giáp.

## Bảo quản:

- Để xa tầm tay trẻ em
- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



**Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM GIA**

Địa chỉ: Lô 06, đường Ngô Văn Sở, tổ dân phố số 16, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý**  
Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Huệ*

