



NỘI DUNG MẪU NHÃN

1. Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch xịt họng
2. Chứng loại: ASI- IODINE THROAT SPRAY
3. Quy cách đóng gói: 15ml, 20ml, 50ml, 90ml, 100ml, 125ml, 150ml, 200ml, 500ml

4. Thành phần:

Povidone Iodine 0,45% w/v
Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%

5. Công dụng

- Hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm, nhiễm khuẩn của niêm mạc miệng và cổ họng như: viêm họng, viêm amidan, viêm loét miệng, viêm nướu, loét áp tơ, nhiễm nấm Candida, cảm và cúm.
- Để vệ sinh răng miệng trước, trong và sau khi phẫu thuật nha khoa và vùng miệng.

6. Hướng dẫn sử dụng

- Xịt vào niêm mạc họng hoặc miệng vài lần một ngày (cách mỗi 3-4 giờ)

7. Bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.
- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Tránh xa nguồn lửa hoặc nơi có nhiệt độ cao, để xa tầm tay trẻ em.

8. Chống chỉ định

- Không dùng cho người mẫn cảm với iod hoặc povidone.
- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

9. Cảnh báo và thận trọng

- Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Chỉ dùng ở miệng, họng. Không bôi lên da.
- Ngừng sử dụng trong trường hợp kích ứng tại chỗ.
- Không sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng.

Số đăng ký:

Số lô, NSX: xem trên bao bì

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Đăng ký và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH

Địa chỉ: Liên kê 23 - Lô 5 - Khu đất đấu giá Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.3351.8639

Hotline: 0987.360.168

Website: www.asimec.vn

Sản xuất: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH**

Địa chỉ: Văn Lâm, Liêm Tiết, Phú Lý, Hà Nam