



Ngày 20/08/2020

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế		DỤNG CỤ PHẪU THUẬT DÙNG TRONG Y TẾ
1	<b>Chỉ định</b>	Các dụng cụ được sử dụng theo công dụng của chúng trong các lĩnh vực y tế, chuyên khoa đặc biệt bởi nhân viên có chuyên môn. Người sử dụng có trách nhiệm lựa chọn các dụng cụ vào các mục đích nhất định trong quá trình phẫu thuật, và đảm bảo rằng người sử dụng đã được đào tạo, được cung cấp đầy đủ thông tin cũng như có đủ kinh nghiệm để sử dụng các dụng cụ.
2	<b>Hướng dẫn xử lý khử khuẩn tiệt khuẩn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khử trùng bằng phương pháp áp suất hơi nước</li> <li>- Không được phép sử dụng các phương pháp khử trùng và phương pháp tiệt trùng nhanh.</li> <li>- Với phương pháp hút chân không nhiều giai đoạn, thời gian sấy đủ khô của sản phẩm không được ít hơn 15 phút.</li> <li>- Nhiệt độ khử trùng tối đa: 138°C (280°F); cộng với dung sai tương ứng theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 17665-1.</li> <li>- Thời gian khử trùng (thời gian tiếp xúc ở nhiệt độ khử trùng) ít nhất là 20 phút ở nhiệt độ 121°C (250°F) hoặc 5 phút ở nhiệt độ 132°C (270°F) / 134°C.</li> <li>- Tủ tiệt trùng dùng hơi nước đáp ứng tiêu chuẩn DIN EN 13060 và DIN EN 285</li> <li>- Đáp ứng tiêu chuẩn với DIN EN ISO 17665-1</li> </ul>
3	<b>Bảo quản</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu trữ nơi khô ráo, không bụi, nhiệt độ ổn định, không có tác động của lực từ bên ngoài, và không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của các thiết bị phát sóng</li> <li>- Nên để trong khay, hộp và tủ</li> <li>- Không cần bảo quản trong điều kiện đặc biệt</li> </ul>
4	<b>Cảnh báo</b>	<p>Các dụng cụ luôn được cung cấp trong tình trạng “CHƯA KHỬ TRÙNG”. Vui lòng kiểm tra về tên sản phẩm, tính hoàn chỉnh, tình trạng và chức năng của chúng, trước khi chúng được chuyển cho người sử dụng.</p> <p>Trước khi sử dụng, các dụng cụ phải được kiểm tra xem có bị vỡ, nứt, biến dạng, hư hỏng và hiệu quả chức năng. Đặc biệt, bạn phải kiểm tra các chức năng như: cắt, mài, khóa, chặn, chốt và tất cả các linh kiện của chúng. Các dụng cụ bị mòn, biến dạng, gãy hoặc hư hỏng do nhiều nguyên nhân thì phải được loại bỏ.</p> <p>Việc tái sử dụng sản phẩm thường xuyên có thể gây ra một số hậu quả nhất định đối với tuổi thọ của sản phẩm do hao mòn, hư hỏng và sử dụng không đúng công dụng.</p> <p>Các dụng cụ sau khi được sử dụng trên những bệnh nhân mắc bệnh CreutzfeldtJakob (CJK) hoặc các biến thể của nó thì phải được tiêu hủy và không được tái sử dụng.</p> <p>Không được sử dụng kiềm, chất làm sạch &gt; pH 7 cho các dụng cụ có chứa nhôm.</p>

M.S.D.N: 0305024012 C.T.I.N.H  
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH  
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  
 GIÁM ĐỐC  
 Trương Thị Diễm Thúy