
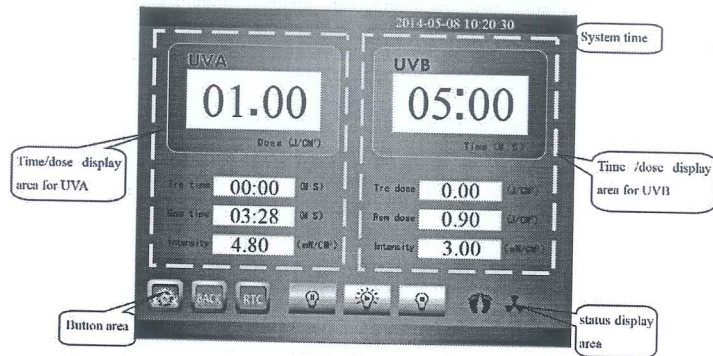


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4001B

Bảng điều khiển:

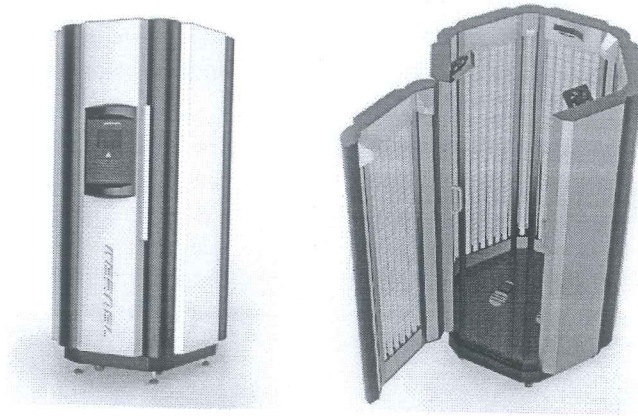

GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Phương Thanh*

Khu vực hiển thị thời gian / liều lượng được sử dụng để thiết lập các thông số của tia UVA (hoặc UVB) và hiển thị phương pháp điều trị, liều lượng còn lại (hoặc thời gian) và cường độ. (Lưu ý: các giao diện chính rất khác nhau do các mẫu khác nhau mà bạn đã chọn hoặc mua. Hình trên là giao diện của loại KN-4001AB. Loại KN-4001A chỉ hiển thị giao diện UVA và KN-4001B hiển thị giao diện UVB.)

Khu vực nút

trạng thái hiển thị

Thời gian hệ thống

Hiển thị thời gian / liều lượng

khu vực cho tia UVA

Hiển thị thời gian / liều lượng cho UVB

Hệ thống xử lý bức xạ UV KN-4001

18

Bức ảnh. 4-3 Cửa sổ hiển thị thời gian / liều lượng

Cửa sổ cài đặt hiển thị "liều lượng" hoặc "thời gian" điều trị, để thiết lập trong "cài đặt chế độ" (xem chương 4.2.3). Nhấp vào cửa sổ này để nhập liều lượng và thời gian

Trong quá trình điều trị, cửa sổ này hiển thị "liều lượng còn lại" hoặc "thời gian còn lại".

Cửa sổ thông tin "thiết lập cửa sổ" hiển thị "liều lượng", và "cửa sổ thông tin" hiển thị "thời gian điều trị", "thời gian còn lại" và "thông tin cường độ". Trong quá trình điều trị, thông tin cửa sổ sẽ thay đổi động theo kết quả điều trị. Không thể thiết lập cửa sổ này.