



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4002B1

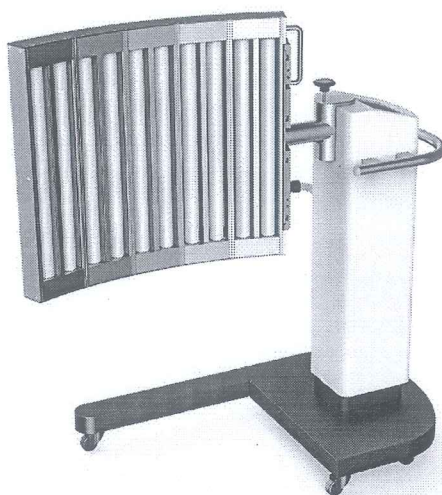

Bảng điều khiển:

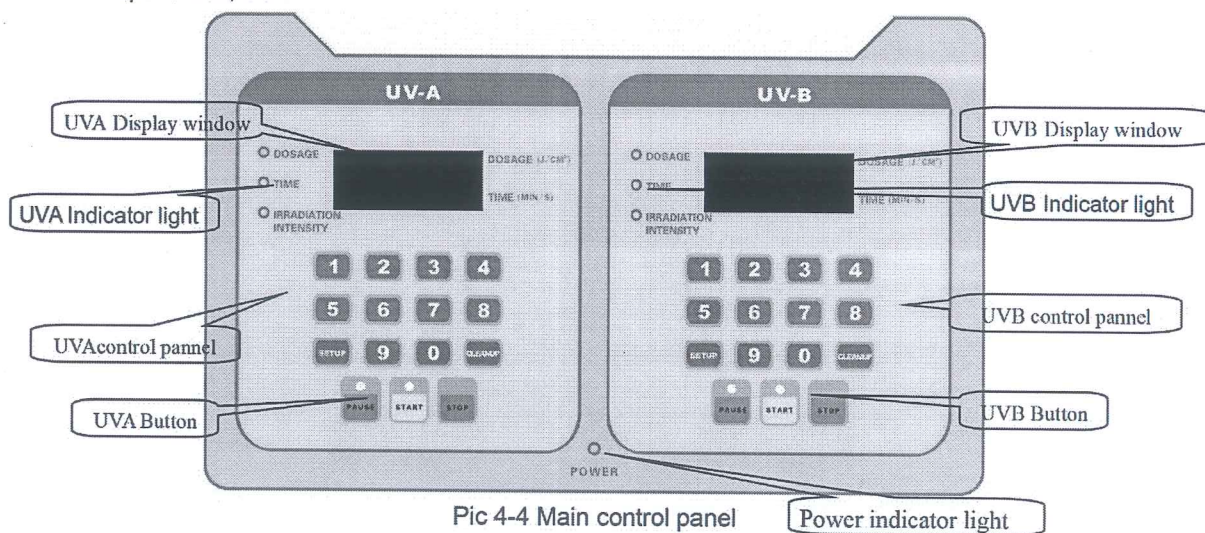

Pic 4-4 Main control panel

1. Đèn báo

Đèn báo nguồn Trạng thái bật / tắt nguồn thiết bị trực tiếp. Bật công tắc nguồn, đèn báo bật sáng; tắt công tắc nguồn, đèn tắt. Đèn báo liều Nó hiển thị giá trị của liều hiện tại trên cửa sổ hiển thị nếu đèn sáng, đơn vị J / cm^2

Đèn báo thời gian Nó hiển thị giá trị của thời gian hiện tại trên cửa sổ hiển thị

đèn sáng, đơn vị min.sec

Đèn báo cường độ chiếu xạ Cho biết giá trị của dòng điện

liều chiếu xạ trên cửa sổ hiển thị nếu đèn sáng, đơn vị mW / cm²

Chỉ báo khởi động Nó cho thấy thiết bị đang được xử lý

Chỉ báo tạm dừng Nó cho thấy thiết bị đang tạm ngừng

2. Nút

Các phím số Từ 0 đến 9 phím số, được sử dụng để đặt liều bức xạ, cường độ chiếu xạ và kích thước thời gian chiếu xạ

Chú ý: Dữ liệu nhập ít nhất phải bằng 4 từ trái qua phải, nhấn nút Dừng để xác nhận. Nếu không, thiết bị không khởi động, hơn 4, thiết bị không được chấp nhận. Nút Cài đặt Được sử dụng để chọn công việc — Chuyển đổi chế độ giữa công việc và thời gian. Chế độ mặc định dành cho liều lượng, đèn báo liều lượng sáng. Nhấn phím này, đèn báo thời gian, chế độ intothetime; nhấn phím một lần nữa, quay lại chế độ liều lượng.

Đèn báo nguồn tia UVA

Pannel kiểm soát tia UVA

Kênh kiểm soát tia UVB

Cửa sổ hiển thị tia UVA UVB Display window UVA Đèn báo

Đèn UVB Indicator

Nút UVB

Nhấn các phím cài đặt + phím số “9” để vào chế độ cài đặt cường độ bức xạ

Nút xóa Nhấn nút này để vào chế độ cài đặt thông số

Nút bắt đầu Nhấn nút này sau khi cài đặt chế độ, bật nút, chuyển sang trạng thái làm việc. Nút tạm dừng Sử dụng để tạm dừng công việc vì bức xạ, đèn UV tắt, liều lượng hoặc giá trị thời gian sẽ bị đóng băng

Nút dừng Sử dụng để dừng công việc hoặc rút khỏi chế độ cài đặt thông số bức xạ — Dừng để dừng bức xạ đèn cực tím. Rõ ràng liều lượng hoặc thời gian và đóng đèn. — Xác nhận và thoát khỏi chế độ cài đặt, nhấn nút này để lưu và nhập

chế độ chờ sau khi hoàn thành cài đặt



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Phương Loanh

