

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4003B2

Bảng điều khiển:



Bắt đầu hẹn giờ: nhấn "T" để bắt đầu tính giờ;

Sau khi điều trị: Khi điều trị bức xạ kết thúc, nguồn sẽ tự động tắt. Phương thức tắt máy: Thiết bị không hoạt động trong một khoảng thời gian sẽ tự động tắt. Nhấn và giữ "T" để tắt nguồn.



Hai chế độ điều trị

Hai chế độ điều trị: liều lượng và thời gian. Độ chính xác của điều trị có thể được đảm bảo bằng cách cài đặt liều bức xạ, hoặc thời gian truyền thống có thể sử dụng phương pháp kiểm soát dễ dàng hơn.

Khi thiết bị kết nối sạc, đèn báo sẽ sáng. Thiết bị đang ở trạng thái sạc pin, đèn báo màu vàng; Nếu quá trình sạc kết thúc, chỉ báo sẽ chuyển sang màu xanh lục. Sẽ mất 4 giờ để sạc 85%, có thể sử dụng hơn 2 giờ sau đó.



GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Phương Thanh