



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4004B

Bảng điều khiển:

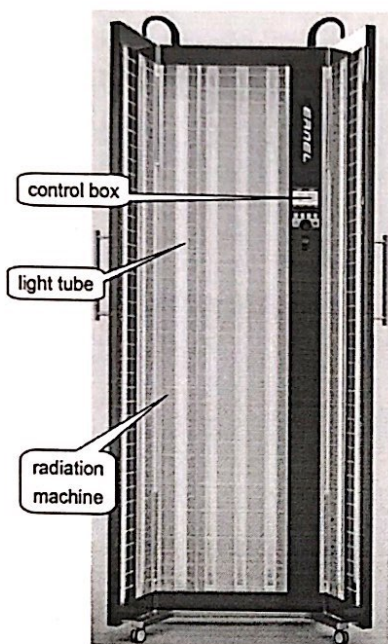

Pic 2-1KN-4004A/B/AB

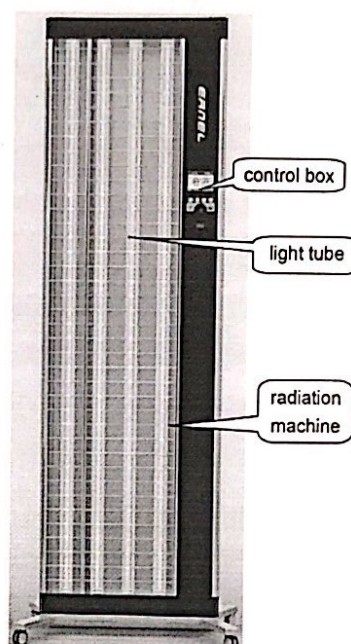

Pic 2-2 KN-4004A1/B1/AB1

Lấy thiết bị ra khỏi hộp và đặt nó ở vị trí an toàn và dễ quan sát, sau đó khóa bánh xe đa năng ở phía dưới. □ Kiểm tra các bộ phận ngẫu nhiên phù hợp với danh sách đóng gói để đảm bảo tính đồng bộ của các bộ phận.

Hoạt động

Người vận hành phải đeo kính chống tia cực tím trước khi bắt đầu điều trị.

Khởi động Bật công tắc nguồn, bật nguồn, đèn báo nguồn và bảng điều khiển

sáng lên, vào chế độ làm việc

Kiểm tra Kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không. Xác nhận cường độ phơi sáng đặt trước có đúng hay không. Phương pháp chi tiết vui lòng xem Chương 4.3.1. (Nếu đầu dò thu nhận cường độ được định cấu hình, đầu dò có thể được sử dụng để kiểm tra lại cường độ nào, nhằm đảm bảo độ chính xác của

các giá trị cường độ. Phương pháp thu thập cường độ nằm trong chương 4.4)

Đặt chế độ bệnh nhân, liều điều trị hoặc thời gian điều trị;

Patient Đặt vị trí chiếu xạ cần thiết được hướng trực tiếp vào quá trình chiếu xạ, từ thiết bị L (20 cm Chức năng hẹn giờ

Chức năng hẹn giờ bằng máy vi tính, nhắc nhở thời gian điều trị còn lại, loại bỏ rắc rối về thời gian tính toán và thuận tiện cho người dùng nắm bắt tình hình điều trị kịp thời.



GIAM ĐỐC  
Trần Thị Phương Loanh