


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4006BL

Bảng điều khiển:



Figure 2-1 KN-4006A/KN-4006B Figure 2-2 KN-4006AL/KN-4006L

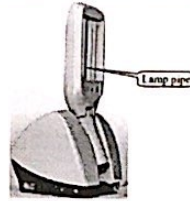

Pic 2-3 Back effect



Figure 2-4 Right port

Figure 2-5 Left port

Lấy thiết bị ra khỏi hộp và đặt nó ở vị trí an toàn và dễ quan sát, sau đó khóa bánh xe đa năng ở phía dưới. Kiểm tra các bộ phận ngẫu nhiên phù hợp với danh sách đóng gói để đảm bảo tính đồng bộ của các bộ phận.

Hoạt động

Người vận hành phải đeo kính chống tia cực tím trước khi bắt đầu điều trị.

Khởi động: Bật công tắc nguồn, bật nguồn, đèn báo nguồn và bảng điều khiển

sáng lên, vào chế độ làm việc

Trạng thái UVA / UVB

Hiện thị loại đèn. Đèn UVA đang được sử dụng hiển thị dấu hiệu; Dấu UVB shows. Bắt đầu đánh dấu "" nhấp nháy cho thấy tia UV là đầu ra và đánh dấu đang bật. Tạm dừng

Dấu "" nhấp nháy cho thấy thiết bị đang ở trạng thái tạm dừng, đèn LED tắt, thời gian tắt và không có đầu ra UV.

UVA UVB Bắt đầu tạm dừng Loa dừng mở Thời gian chiếu xạ Dấu trạng thái

Dấu UVoutput

Dừng lại

Khi dấu "" nhấp nháy, nó sẽ hiển thị thiết bị dừng, không có đầu ra UVout và thời gian bị xóa. Dấu đầu ra UV tắt. Loa

Khi loa được bật, sẽ được hiển thị trên màn hình. Khi loa tắt, sẽ được hiển thị trên màn hình.



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Phương Thanh