

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4006B1

Bảng điều khiển:



Hoạt động

Người vận hành phải đeo kính chống tia cực tím trước khi bắt đầu điều trị.

Khởi động Bật công tắc nguồn, bật nguồn, đèn báo nguồn và bảng điều khiển

sáng lên, vào chế độ làm việc

Khởi động Bật công tắc nguồn, khởi động thiết bị, giá trị cho lần điều trị cuối cùng đang hiển thị on the display window. Kiểm tra Kiểm tra thiết bị để xem nó có hoạt động bình thường hay không. Xác nhận cường độ chiếu xạ đặt trước có đúng hay không; Chi tiết vui lòng xem Chương 4.3.2. Đặt liều lượng và thời gian điều trị

Bệnh nhân Khu vực chiếu xạ hiệu quả của não (vui lòng xem Hình 4-1) là một hình chữ nhật

26,2cm * 19,6cm. Và vùng chiếu xạ 510cm²

. Đặt thiết bị chiếu xạ cần thiết vào ngay bề mặt đầu ra ánh sáng UV của

Hệ thống xử lý bức xạ UV KN-4006A1 / B115

dụng cụ. từ thiết bị L (khoảng 3cm), asPic 4-1:

Người vận hành Đeo kính chống tia UV, nhấn nút “”, quá trình điều trị bắt đầu. Quy trình điều trị Nếu cần tạm ngừng điều trị giữa chừng, người vận hành có thể nhấn nút xuống “” của bảng điều khiển chính, tạm dừng điều trị; Nếu muốn tiếp tục điều trị, nhấn nút “”, tiếp tục điều trị; Nếu muốn chấm dứt điều trị, nhấn nút “”, điều trị kết hợp

Kết thúc điều trị Liều lượng hoặc thời gian nhận về 0, kết quả là giảm. Tắt thiết bị Kết thúc quá trình điều trị hoặc không mở thiết bị trong thời gian dài, vui lòng tắt công tắc nguồn.



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Phương Thanh