

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU UV KN-4006BL2

Bảng điều khiển:



□

Bảo vệ trước khi điều trị Trước khi điều trị, nên thoa một số vùng da bị tổn thương do chiếu tia cực tím vào vai trò của dầu tạo lớp sừng (chẳng hạn như dầu khoáng), nó có thể gia tăng sự phát xạ xuyên qua lớp sừng để tăng cường tác dụng trị liệu của bức xạ tia cực tím.

Trạng thái UVA / UVB

Hiện thị loại đèn. Đèn UVA đang được sử dụng hiển thị dấu hiệu;

UVB cho thấy dấu hiệu. □ Bắt đầu đánh dấu "" nhấp nháy cho thấy UV là đầu ra và đánh dấu ison. □

Tạm dừng

Dấu "" nhấp nháy cho thấy thiết bị đang ở trạng thái tạm ngừng, đèn UV tắt, thời gian tắt và không có đầu ra UV. □ Dừng lại

Khi dấu "" nhấp nháy, nó sẽ hiển thị thiết bị dừng, không có đầu ra UVout và thời gian bị xóa. Dấu đầu ra UV tắt. □ Loa

Khi loa được bật, nút sẽ được hiển thị trên màn hình. Khi loa tắt, Nút sẽ hiển thị trên màn hình.

Loa dừng bắt đầu tạm dừng tia UVA UVB trên Speakeroff

Hệ thống xử lý bức xạ UV19

Cài đặt

Hình Pic 4-5 Thời gian phát xạ Hình 4-6 Trạng thái loa Hình 4-7 Thời gian hệ thống

Nhấn phím "" để nhập thiết lập thời gian chiếu xạ, thời gian tắt / mở đèn và thời gian hệ thống, đồng thời đèn chỉnh sửa nhấp nháy.



GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Phương Thanh*