



asimec

An toàn cuộc sống trong tay bạn!

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH

Liên kè 23 - Lô 5 - Mậu Lương - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Tel: 024.3351.8639

Nhà máy: Văn Lâm - Liêm Tiết - Phú Lý - Hà Nam

Website: www.asimec.vn


Hotline: 0987.360.168



NỘI DUNG MẪU NHÃN

Tên trang thiết bị y tế: DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Chủng loại: TẮM KHÔ ASI-DRYBATH




TẮM KHÔ ASI-DRYBATH

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Làm sạch thân thể cho

- Người già
- Người bị tê liệt không vận động được
- Phụ nữ sau khi sinh
- Bệnh nhân sau phẫu thuật

500ml



qr code

TẮM KHÔ ASI-DRYBATH

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI Số công bố sản phẩm

Thành phần:
Purified water, Ethanol, Glycerin, Propylen Glycol, Chlorhexidine Digluconate, Cocamidopropyl Betain, Dịch chiết lô hội, Natri Benzoat, Vitamin E.

Mục đích sử dụng:
Làm sạch bụi bẩn, ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật có hại trên cơ thể. Hỗ trợ làm mau lành vết thương, phòng ngừa loét do tỳ đè.

Hướng dẫn sử dụng:
Sử dụng trực tiếp, không cần pha loãng, không xịt lên vết thương hở. Xoay đầu xịt từ chế độ OFF sang chế độ phun sương SPRAY. Phun trực tiếp dung dịch lên vùng da muốn làm sạch. Sử dụng khăn ẩm lau nhiều lần trên bề mặt da để dung dịch ngấm đều và làm sạch bề mặt, không cần lau lại với nước. Sau khi sử dụng, xoay lại đầu xịt sang chế độ OFF để bảo quản an toàn cho lần sử dụng tiếp theo.

Chống chỉ định: Người dùng mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Cảnh báo và thận trọng:
Sản phẩm dùng ngoài da, tránh tiếp xúc với mắt.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Số lô, NSX: Xem trên bao bì
HSD: 36 tháng kể từ NSX

Đăng ký và phân phối:
Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Thiết bị y tế An Sinh
Liên kè 23, Lô 5, Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Địa chỉ sản xuất: Văn Lâm, Liêm Tiết, Phú Lý, Hà Nam
ĐT: 024.3351.8639 | Hotline: 0987.360.168