

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NỘI SOI

1. Phạm vi áp dụng:

Cho vỏ ống soi sử dụng trong thăm khám, phẫu thuật nội soi phụ khoa.

2. Lưu ý:

Hướng dẫn cơ bản này không thay thế cho các khóa đào tạo chính hãng, sự cẩn trọng và kiến thức về kỹ thuật của người sử dụng. Do đó, chúng tôi giả định rằng người dùng đã có kiến thức cơ bản về các quy định pháp lý, các yêu cầu và tiêu chuẩn cơ bản trong việc sử dụng các thiết bị và dụng cụ y tế.

Tuyệt đối không được tự ý tháo ráp, sửa chữa hoặc thay thế các thành phần và linh kiện của vỏ ống soi (nếu có). Khi gặp trục trặc với vỏ ống soi, liên hệ ngay lập tức hãng KARL STORZ để được khắc phục.

Mọi sự cố và hư hại gây ra do người sử dụng tự ý tháo ráp và sửa chữa vỏ ống soi không qua chính hãng, KARL STORZ có quyền từ chối trách nhiệm.

3. Mục đích sử dụng

Mục đích sử dụng của vỏ ống soi phải tuân theo chức năng thiết kế ban đầu, duy nhất cho nhân sự đã được đào tạo phù hợp. Phẫu thuật viên và người sử dụng khác có trách nhiệm lựa chọn vỏ ống soi và phụ kiện tương ứng với ống soi theo mục đích sử dụng cụ thể và tuân theo mục đích phẫu thuật, đào tạo phù hợp. Vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng KARL STORZ khi cần thêm thông tin và cần sự tư vấn.

4. Các hạn chế:

Người sử dụng không được tự ý sửa chữa, thay thế linh kiện của vỏ ống soi không chính hãng.

5. Kết hợp với các sản phẩm khác:

Vỏ ống soi của hãng KARL STORZ được khuyến cáo chỉ nên sử dụng kết hợp với ống soi và phụ kiện chính hãng KARL STORZ **THEO CHỈ ĐỊNH** của hãng sản xuất. Người sử dụng vui lòng **KHÔNG TỰ Ý** kết hợp các phụ kiện/thiết bị của các hãng khác nhau nếu không có chỉ định của hãng sản xuất bằng văn bản.

Nếu một bộ phận có thể sử dụng trao đổi tùy vào chức năng và tính ứng dụng cụ thể của vỏ ống soi, chúng tôi khuyến nghị bạn đặt hàng linh kiện và phụ kiện cũng của hãng KARL STORZ để bảo đảm tính an toàn và nhất quán của bộ dụng cụ phẫu thuật.

6. Bảo hành:

- Trách nhiệm vệ sinh/tiệt khuẩn/khử trùng phù hợp cho vỏ ống soi và ống soi thuộc về người sử dụng. Tuyệt đối tuân thủ các chỉ định của nhà sản xuất và các quy định quốc gia tương ứng.
- Công ty KARL STORZ loại trừ mọi yêu cầu bảo hành và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc các thiệt hại sau đó được gây ra bởi:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NỘI SOI

- Người sử dụng dung vỏ ống soi cho các mục đích khác chỉ định của hãng sản xuất
- Người sử dụng không được đào tạo theo tiêu chuẩn qui định.
- Vỏ ống soi được xử lý, vệ sinh/tiệt khuẩn không phù hợp/sai chỉ định và khuyến cáo của hãng sản xuất.
- Người sử dụng tự ý cho bảo trì và sửa chữa vỏ ống soi bởi cá nhân/tổ chức không được hãng sản xuất chỉ định/ủy quyền.
- Người sử dụng không tuân thủ theo văn bản hướng dẫn này.

KHUYẾN CÁO: Việc sửa chữa, bảo hành, bảo trì chỉ có thể được thực hiện bởi các cá nhân và tổ chức được ủy quyền bằng văn bản bởi công ty KARL STORZ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu người sử dụng tự ý tháo lắp và sửa chữa dẫn đến hư hại sản phẩm.

Phần II: Thông tin xử lý

1. Các vấn đề cơ bản về vệ sinh và bảo quản sản phẩm:

- Sản phẩm mới nguyên và được hoàn trả sau sửa chữa phải được vệ sinh hoặc tiệt khuẩn lại trước khi sử dụng lần đầu cũng như là những sản phẩm đã qua sử dụng.
- Trong quá trình vận chuyển, sản phẩm phải được giữ cố định trong khay và hộp đựng chính hãng. Khay và hộp đựng phải được đóng kín để tránh hư hại và nhiễm khuẩn.
- Tránh làm rơi sản phẩm.
- Luôn tuân thủ các chỉ định vệ sinh/tiệt trùng tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đã hướng dẫn.
- Tuyệt đối không dùng lực mạnh, các vật nhọn, các vật kim loại khác để tác động mạnh lên sản phẩm.
- Không sử dụng các hóa chất ngoài chỉ định của nhà sản xuất để vệ sinh sản phẩm.
- Phải tuân thủ các chỉ dẫn và khuyến nghị về an toàn sử dụng của nhà sản xuất.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo và thoáng mát.
- Luôn kiểm tra hình thái bên ngoài và chức năng hoạt động của sản phẩm trước khi sử dụng.

VUI LÒNG CHÚ Ý ĐẾN CÁC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO TỪNG SẢN PHẨM THEO CHỈ DẪN CỦA NHÀ SẢN XUẤT.

2. Bảo quản:

- Sản phẩm sau khi được vệ sinh theo qui định phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không có tác động của lực từ bên ngoài, không có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.
- Sản phẩm của KARL STORZ nên được để trong khay/ hộp chứa của hãng KARL STORZ để tránh va đập gây hư tổn.
- Liên hệ ngay với hãng KARL STORZ khi vỏ ống soi có hình thái và/hoặc hoạt động không bình thường.