



## HDSD Nòng Trocar

- EJ - 001 - XXX
- EJ - 011 - XXX

### STEMA Trocars

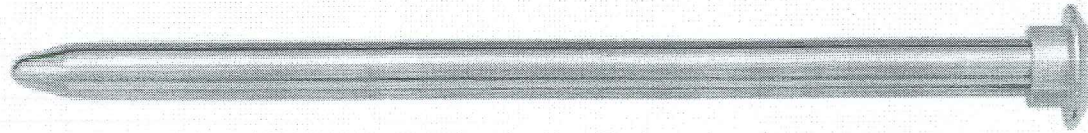

Mẫu: EJ - 011 - XXX

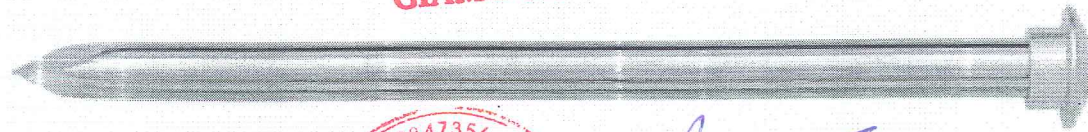

Mẫu: EJ - 001 - XXX



*KS. Nguyễn Văn Lịch*

## Làm sạch / Khử trùng

Ngay sau khi sử dụng các dụng cụ phải được ngâm trong một hỗn hợp giải pháp khử trùng và làm sạch theo thứ tự để ngăn đóng cặn sau khi hoạt động và sự lây truyền vi trùng trong các phòng nội soi. Chất làm sạch và dung dịch khử trùng phải phù hợp. Vui lòng tuân thủ các nguyên tắc tương ứng đối với các chất này. Các công cụ phải trải qua một quá trình làm sạch kỹ lưỡng quá trình, bởi vì chất tẩy rửa, máu, mủ và cặn protein có thể ảnh hưởng quy trình khử trùng

và tiệt trùng. Sau quy trình làm sạch, tất cả các bộ phận chuyển động phải được tra dầu. Tất cả các van khóa và pit tông phải được bôi trơn.

Cần thiết các thao tác bảo trì, bảo dưỡng để việc sử dụng đáp ứng an toàn thiết bị y tế. Do đó chúng tôi đề nghị kiểm tra kỹ lưỡng chức năng, tính chắc chắn và các thiệt hại (đặc biệt là xóp và các bộ phận bằng cao su và nhựa bị nứt), các cạnh sắc và bề mặt thô ráp.



CE 0483



## Chủ đích

Thiết bị phẫu thuật xâm lấn có thể tái sử dụng để sử dụng tạm thời. Nó cho phép truy cập vào khu vực hoạt động phẫu thuật.



## Chỉ định

Dụng cụ này được thiết kế để sử dụng trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và đặc biệt là nội soi ổ bụng. Nó cho phép đưa các dụng cụ, ống kính soi và chất lỏng vào vùng phẫu thuật.

## Chống chỉ định

Dụng cụ này không được thiết kế để sử dụng cho hệ thống tuần hoàn và thần kinh trung ương.

### STEMA Trocars

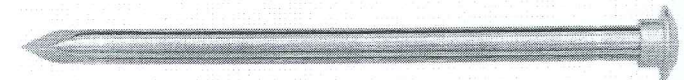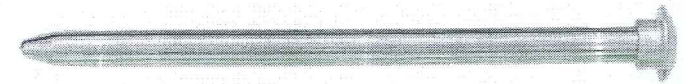

*Xin hãy chú ý đến thông tin cơ bản và chăm sóc, bảo dưỡng và làm sạch của chúng tôi.*