

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**DỤNG CỤ ĐỊNH VỊ BỆNH NHÂN – DÙNG TRONG PHÒNG MỔ**  
**HÃNG SẢN XUẤT: LIBERTECH CORPORATION / KOREA**

<b>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b>	<b>VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Sử dụng tốt trên thực tế lâm sàng, kiểm tra tình trạng bệnh nhân và các vị trí cơ thể trước khi dùng</li><li>- Tránh đặt gần các dụng cụ sắc nhọn.</li><li>- Có thể làm ấm dụng cụ định vị (nhiệt độ phù hợp là 40<sup>0</sup>C) trước khi sử dụng trên bệnh nhân.</li><li>- Tránh kéo dụng cụ định vị trong khi đang kê bệnh nhân.</li><li>- Tránh kéo dụng cụ trên bề mặt không bằng phẳng hoặc sắc nhọn.</li><li>- Không cắt hoặc xé dụng cụ.</li><li>- Không đặt sản phẩm gần nơi có nhiệt độ cao hoặc chất dễ gây cháy.</li><li>- Dụng cụ có trọng lượng lớn phải được vận chuyển đúng cách.</li><li>- Không được đông lạnh dụng cụ khi bảo quản</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Các dụng cụ định vị có thể dễ dàng lau sạch bằng cách sử dụng các chất diệt khuẩn phổ biến trong y tế: Cồn 70</li><li>- Tránh ngâm sản phẩm trong dung dịch diệt khuẩn thời gian dài.</li><li>- Chú ý vệ sinh thật sạch xung quanh viền của các dụng cụ.</li></ul> <p><b><u>Lưu trữ:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bảo quản dụng cụ ở bề mặt phẳng, tránh gập các dụng cụ.</li><li>- Các tấm lót bàn mổ lớn phải được gập với các cạnh trên 35cm.</li><li>- Tránh đặt vật nặng hoặc sắc nhọn lên dụng cụ khi bảo quản.</li><li>- Nhiệt độ bảo quản sản phẩm dưới 50<sup>0</sup>C và trên -18<sup>0</sup>C.</li></ul>