

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Xác nhận bằng chữ ký số

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Chi

Chủ sở hữu sản phẩm: Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

Cơ sở sản xuất: Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota, 55318, USA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch và máy phân tích tế bào dòng chảy

CONTRAD 70

Chỉ dành cho cán bộ chuyên môn.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Contrad 70 được sử dụng cho các quy trình làm sạch trên các máy phân tích miễn dịch dòng Access và máy phân tích tế bào dòng chảy DxFlex.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chủng loại: CONTRAD 70

Mã sản phẩm: 81911

Quy cách đóng gói: Bình 1 L

Thành phần chính: KOH 1 – 5%

ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ BẢO QUẢN

Sản phẩm ổn định tới hết hạn sử dụng ghi trên nhãn khi được bảo quản đúng theo khuyến cáo.

Bảo quản ở 15°C-30°C.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

PHÂN LOẠI NGUY CƠ THEO GHS



NGUY HẠI

H314 Có thể gây bỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng.

P280 Đeo găng tay, mặc quần áo bảo hộ và các thiết bị bảo vệ mắt/ mặt.

P301+P330+P331 Nếu nuốt phải: Rửa miệng. KHÔNG gây nôn.

P303+P361+P353 Nếu tiếp xúc với da (hoặc tóc): Rửa vùng tiếp xúc với nước.

P304+P340 Nếu hít phải: Đưa người bị nạn tới nơi thoáng khí và đặt ở tư thế thoải mái cho đường thở.

P305+P351+P338 Nếu vào mắt: Rửa mắt với nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng (nếu có và dễ dàng thực hiện). Tiếp tục rửa với nước.

P310 Gọi ngay tới trung tâm chống độc hoặc liên hệ trực tiếp với bác sỹ.

P363 Giặt sạch quần áo nhiễm hóa chất trước khi tái sử dụng.

P405 Bảo quản trong tủ khóa.

P501 Thải bỏ hóa chất và bao bì theo quy định của quốc gia/ khu vực.

KOH: 1 – 5%.

Tuổi thọ: 2 năm.

Cơ sở sản xuất: Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, Minnesota, 55318, USA

Chủ sở hữu sản phẩm: Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA