

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên trang thiết bị y tế: **Băng dán sau tiêm**

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế: 0316182370

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2022

1 - Mục đích/ Chỉ định sử dụng

- Dùng che phủ và bảo vệ vị trí tiêm trên da sau khi tiêm.

2 - Hướng dẫn sử dụng

2.1. Bóc giấy phát hành nhãn dán.

2.2. Dán và cố định lên mép bàn.

2.3. Giữ mép gấp và bóc miếng băng dán ra mà không chạm vào chất kết dính.

2.4. Dán miếng băng dán vào vị trí tiêm mà không cần chạm vào miếng đệm..

3 - Cảnh báo và thận trọng

3.1. Sử dụng khi da khô và làm sạch và tránh làm bẩn miếng băng dán khi dán.

3.2. Đối với người có da nhạy cảm, không sử dụng sản phẩm này trong thời gian dài. Thay miếng băng dán nhiều lần trong ngày.

3.3. Không dán miếng băng dán vào vết thương hở.

3.4. Thay băng dán khi miếng băng bị thấm hay bẩn.

3.5. Sử dụng ngay khi mở bao bì.

3.6. Ngừng sử dụng khi có bất kỳ tác dụng phụ nào như: phát ban, mẩn đỏ hay ngứa da.

3.7. Sản phẩm dùng 1 lần và không tái sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

Giám đốc



SUGIOKA YOSHIHISA