

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM (MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ)

Model: CWM-302

Hãng sản xuất: CHUNGWOO CO., Ltd

Nước sản xuất: Hàn Quốc

I. MÔ TẢ CHUNG

Model CWM-302P là Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng đầu dò siêu âm tần số 1 Mhz và 3Mhz.



✓ CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

- 4 chế độ điều trị
- 4 tần số có thể được cài sẵn


✓ CHẾ ĐỘ AN TOÀN Cầu chì an toàn 3.15A

✓ CÔNG DỤNG Giảm đau cơ, đánh tan mỡ

✓ ĐẦU DÒ



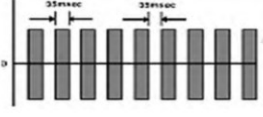
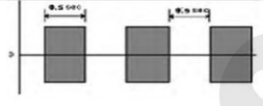
| | |
|---|--|
| A white handpiece with a cable, circled in red. | Đầu dò tần số 1MHz sử dụng cho bụng, hông, thắt lưng/eo... |
| A black handpiece with a cable, circled in red. | Đầu dò tần số 3MHz sử dụng cho mặt, tay, đùi... |

II. GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN

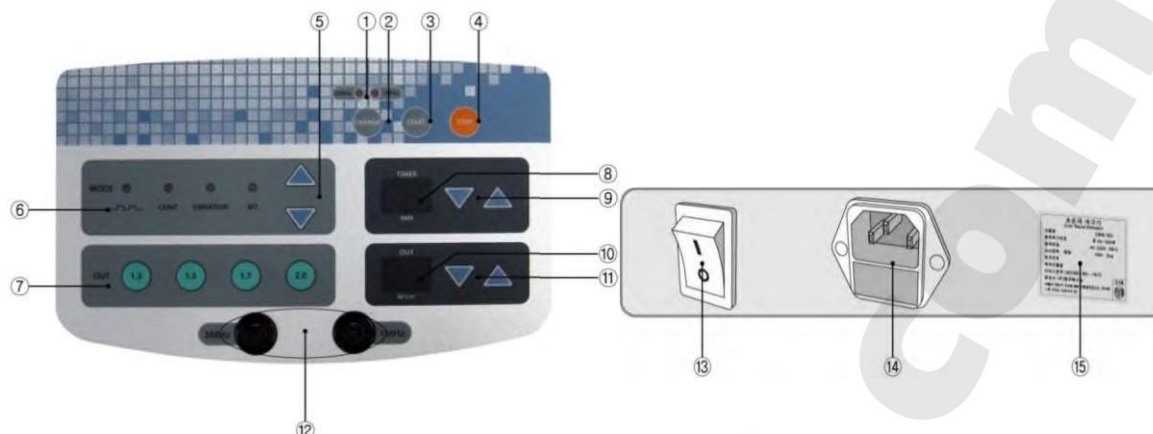


| Số | Tên | Chức năng |
|----|-----------------------------|--|
| ① | Đèn báo đầu ra | Báo tần số đầu ra |
| ② | Nút chọn đầu ra | Chọn tần số đầu ra |
| ③ | Nút khởi động | Khởi động máy |
| ④ | Nút dừng | Dừng vận hành |
| ⑤ | Nút chọn chế độ | Chọn các chế độ điều trị |
| ⑥ | Đèn báo chế độ | Chỉ thị chế độ điều trị đang được chọn |
| ⑦ | Nút chọn bước sóng | Chọn cường độ đầu ra |
| ⑧ | Màn hình hiển thị thời gian | Hiển thị thời gian vận hành |
| ⑨ | Nút chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian vận hành |
| ⑩ | Màn hình hiển thị cường độ | Hiển thị cường độ đầu ra |
| ⑪ | Nút điều chỉnh cường độ | Điều chỉnh cường độ đầu ra |
| ⑫ | Đầu kết nối đầu dò | Kết nối đầu dò |
| ⑬ | Nút nguồn | BẬT/TẮT máy |
| ⑭ | Đầu kết nối dây nguồn | Kết nối dây nguồn |
| ⑮ | Tem thông số | Hiển thị thông số kỹ thuật của máy |

III. CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ
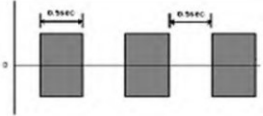
| Chế độ | Bước | | | | Dạng sóng | Giải thích |
|-----------|-------|-------|-------|------|---|--|
| | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | | |
| Biến xung | 0.65w | 0.75w | 0.85w | 1.0w |  | Tần số 1 MHz phát ngắt quãng: dừng 0.5 giây và chạy 0.5 giây |
| Liên tục | 1.3w | 1.5w | 1.7w | 2.0w |  | Tần số 1 MHz phát liên tục |
| Rung | 0.7w | 0.8w | 0.9w | 1.1w |  | Tần số 1 MHz phát ngắt quãng: dừng 35 mili giây và chạy 35 mili giây |
| Từng đoạn | 0.65w | 0.75w | 0.85w | 1.0w |  | Tần số 1 MHz chạy 1.0 giây và dừng 1.0 giây |


IV. VẬN HÀNH

ĐỂ NGƯỜI BỆNH NGỒI HOẶC NẰM Ở TƯ THẾ THOẢI MÁI.

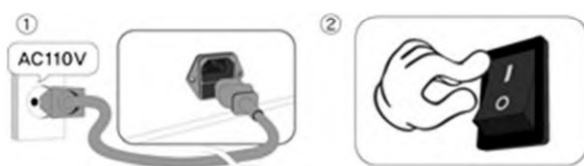

- ① Cắm nguồn
- ② Bật nút nguồn (sau lưng máy)







- ③ Cắm đầu dò cần dùng vào máy
- ④ Trường hợp dùng đầu dò 1MHz thì phải bấm nút chọn đầu ra. 

✓ Khi bật nút nguồn sau lưng máy, màn hình hiển thị mặc định là đang sử dụng đầu dò 3Mhz



Điều chỉnh đếm đảm bảo cường độ đầu ra bằng "0"



- ⑤ Ấn   để chọn chế độ vận hành
- ⑥ 1. Ấn   để chọn chế độ xung
2. Hoặc chọn 1 trong 4 chế độ đặt trước



Không vận hành máy khi tay ướt để tránh giật điện



- ⑦ Ấn   để đặt thời gian
- ⑧ Ấn  để bắt đầu vận hành




Phải dùng đủ gel siêu âm trước khi vận hành



Không sử dụng liên tục trong thời gian dài lên 1 bộ phận của cơ thể



- ⑨ Sau khi hết thời gian đặt trước, sẽ có tiếng bíp báo hiệu và máy sẽ dừng chạy. Cần ấn nút  để dừng hoàn toàn thiết bị.



- ⑩ Tắt nút nguồn sau lưng máy khi không sử dụng máy. Nếu dùng trong thời gian dài thì phải rút cả dây nguồn.