




Dây truyền dịch dùng một lần

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

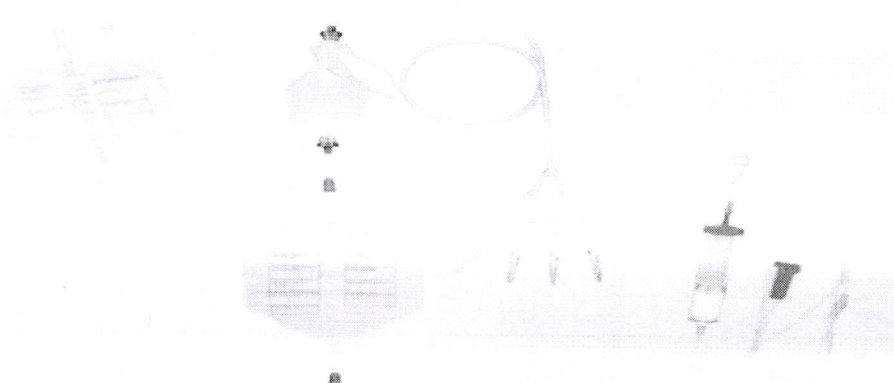

1. Kiểm tra bao bì, không sử dụng khi bao gói bị hở
2. Mở, xé túi đựng dây theo vết cắt chỉ dẫn, kiểm tra tình trạng sản phẩm
3. Thao tác mở duỗi dây tránh bị gập gãy, xoay bộ điều chỉnh lưu lượng về vị trí đóng.
4. Mở nắp chụp bảo vệ kim chai, cắm kim chai vào bình dịch truyền treo trên giá.
5. Dùng hai ngón tay bóp liên tiếp 1 đến 2 lần lên bình đếm giọt (bầu lọc) sao cho dịch truyền chảy xuống $\frac{1}{2}$ bình thì dừng lại.
6. Lắp kim vào đầu nối kim.
7. Điều chỉnh bánh xe hoặc xoay bộ điều chỉnh giọt mở lớn ra để dịch truyền chảy qua dây ra ngoài nhằm đẩy hết khí trong ống dây ra ngoài, sau đó điều chỉnh bánh xe lăn hoặc bộ điều chỉnh giọt để khóa lại.
8. Thực hiện quá trình truyền dịch và kiểm soát tốc độ truyền dịch bằng bộ phận điều chỉnh lưu lượng
9. Kết thúc quá trình truyền thực hiện khóa bộ điều chỉnh lưu lượng, để thực hiện rút kim truyền ra.

Chú ý:

- Trường hợp còn bọt khí còn sót lại trong ống dây
- + Nếu ở gần bình đếm giọt trên van điều chỉnh lưu lượng thì di chuyển cụm van lưu lượng vượt cho bọt khí thoát hết lên bầu đếm giọt
- + Nếu ở bên dưới van, tiếp tục mở rộng van lưu lượng để dịch truyền chảy nhanh xuống dưới duỗi hết bọt khí ra.
- Không dùng khi bao gói bị hở
- Chỉ sử dụng khi có sự hướng dẫn của bác sĩ
- Sử dụng 1 lần, dùng xong hủy bỏ theo quy định của vật tư y tế
- Hạn sử dụng sản phẩm: 5 năm kể từ ngày sản xuất