



**IDS Medical Systems (Vietnam) Limited**  
12A Floor, Lottery Tower, 77 Tran Nhan Ton St.  
Ward 9, District 5, HCMC, Vietnam  
T : +84 283 8303 072  
F : +84 283 8303 074  
E : vnmcustomercare@idsmed.com  
[www.idsMED.com](http://www.idsMED.com)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Máy tạo oxy – Model: 525KS/ 1025KS**

**Hãng: Devilbiss/USA**

### **Lắp đặt trước khi sử dụng:**

1. Đặt thiết bị của bạn gần ổ cắm điện trong phòng nơi bạn dành phần lớn thời gian

**Cảnh báo: Đặt máy xa các nguồn nóng, phát tia lửa ít nhất 1,6 mét**

2. Đặt thiết bị của bạn ít nhất 16 cm từ tường, rèm hoặc bất kỳ vật nào khác có thể ngăn cản luồng không khí thích hợp vào và ra khỏi thiết bị. Máy tạo oxy phải được đặt để tránh các chất ô nhiễm hoặc khói.

### **Trước khi khởi động máy tạo oxy**

1. Trước khi vận hành thiết bị của bạn, hãy luôn kiểm tra để đảm bảo bộ lọc không khí (nằm ở phía sau thiết bị của bạn) sạch sẽ.

2. Gắn các phụ kiện vào đường ra thiết bị

#### *Kết nối dây thở*

a. luôn công kết nối đầu ra với đầu ra

b. Kết nối dây trực tiếp với công kết nối

#### *Dây thở kết nối với bình làm ấm*

Nếu bác sĩ của bạn đã đề xuất bình làm ấm trong phác đồ điều trị của bạn, làm theo những bước sau:

a. Đổ nước cất vào bình, không được đổ quá đầy

b. Luôn đai ốc cánh nằm trên đỉnh của bình tạo ấm vào lỗ thoát khí oxy để nó được treo. Đảm bảo rằng nó được thắt chặt an toàn



**IDS Medical Systems (Vietnam) Limited**  
12A Floor, Lottery Tower, 77 Tran Nhan Ton St.  
Ward 9, District 5, HCMC, Vietnam  
T : +84 283 8303 072  
F : +84 283 8303 074  
E : vnmcustomercare@idsmed.com  
[www.idsMED.com](http://www.idsMED.com)

c. Gắn ống oxy trực tiếp vào khớp nối đầu ra của bình tạo ẩm

3. Bác sĩ của bạn đã hướng dẫn sử dụng gọng mũi hoặc mặt nạ. Trong hầu hết các trường hợp, chúng đã được gắn vào ống oxy

4. Tháo hoàn toàn dây nguồn khỏi dây đeo của dây. Đảm bảo công tắc nguồn ở vị trí “Tắt” và cắm phích cắm vào ổ cắm trên tường. Thiết bị được cách điện kép để bảo vệ chống điện giật

### **Khởi động máy:**

1. Nhấn công tắc nguồn sang vị trí “Bật”. Khi thiết bị được bật “Bật”, tất cả bốn đèn (Nguồn điện, Yêu cầu dịch vụ, Oxy thấp, và Oxy bình thường) trên bảng điều khiển phía trước sẽ sáng nhanh và tín hiệu âm thanh sẽ báo động trong thời gian ngắn. Sau một vài giây, Đèn nguồn và đèn Oxy bình thường sẽ sáng.

2. Kiểm tra đồng hồ đo lưu lượng để đảm bảo rằng bi của đồng hồ đo lưu lượng nằm ở giữa vạch bên cạnh số quy định của tốc độ lưu lượng của bạn

3. Bây giờ máy tạo oxy đã sẵn sàng để sử dụng, hãy đặt đúng vị trí của gọng mũi hoặc mặt nạ (Hình 4). Để ôxy trong 20 phút tập trung để đạt được hiệu quả tốt nhất.

### **Cảnh báo và thận trọng**

1. Rút phích cắm điện khi không sử dụng sản phẩm

2. Không bịt ống thoát khí hoặc để trên bề mặt mềm như mặt giường hoặc đệm, có thể dẫn đến việc tắc khí.

3. Không sử dụng thiết bị trong túi xách hoặc túi đeo.

4. Để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, cần vệ sinh máy khí dung 3655I sau mỗi lần sử dụng cho bệnh nhân. Khuyến cáo khử khuẩn 1 lần mỗi ngày.

5. Miếng lọc cần được thay thế sau mỗi 6 tháng hoặc sớm hơn nếu bị chuyển màu.