

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
GĂNG PHẪU THUẬT****1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG/ CHỈ ĐỊNH**

Găng tay dùng trong quá trình phẫu thuật, chẩn đoán, điều trị hoặc khám bệnh, nhằm bảo vệ tránh lây truyền bệnh giữa bệnh nhân và người sử dụng găng phẫu thuật.

**2. CẢNH BÁO**

- Cho đến hiện nay, chưa phát hiện tác dụng bất lợi tiềm ẩn liên quan đến sử dụng trang thiết bị y tế được ghi nhận trong quá trình lưu hành sản phẩm. Nhưng về an toàn MERUFA cảnh báo một số người có cơ địa dị ứng với thành phần cao su tự nhiên không nên dùng hoặc ngưng sử dụng ngay nếu thấy xuất hiện triệu chứng dị ứng, nổi mẩn đỏ,...

- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng bất lợi gặp phải khi sử dụng.

**3. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA**

- Để loại bỏ hầu hết số vi khuẩn và vi sinh vật lây nhiễm.

- Phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

- Sau khi rửa hai tay phải để cao ngang ngực, không được va chạm vào các thứ xung quanh.

- Sắp xếp các dụng cụ phải từ ngang eo trở lên.

- Ngưng sử dụng ngay nếu gặp trường hợp dị ứng, nổi mẩn đỏ. Thông báo cho nhà sản xuất.

**4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG****A. Găng phẫu thuật tiệt trùng:**

- Nhận dạng side găng trái và phải trước khi đeo. Cầm phía trên nếp gấp, mặt trái găng và chuyển nó ra khỏi vỏ bọc, 1 tay giữ nếp gấp và mở rộng cổ găng. Cho tay kia vào trong găng theo dung chiều của găng. Tuyệt đối không chạm vào mặt ngoài của găng.

- Dùng tay đã đeo găng cầm vào nếp gấp của găng còn lại. Đưa các ngón tay của tay chưa đeo đẩy vào.

- Khi đã đeo cả hai găng mới tiến hành chỉnh sự phù hợp, độ khít của cả hai găng.

- Sau khi đeo găng, lau hết bột bám bên ngoài găng bằng 1 miếng bọt xốp ẩm hay khăn mềm ướt đã tiệt trùng hoặc bằng một biện pháp hữu hiệu khác.

**B. Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng:**

- Nhận dạng side găng trái và phải trước khi đeo găng.

- Đeo găng đúng cỡ, phù hợp với tay;

- Sau khi đã đeo cả hai găng mới tiến hành chỉnh sự phù hợp, độ khít của cả hai găng.

**C. Tháo găng đúng**

- Tháo găng thứ nhất: dung tay kia cầm lấy mặt ngoài cổ găng lật nhẹ ra ngoài. Sau đó cầm ở lòng bàn tay của tay còn đeo găng.

- Tháo găng thứ hai: dung một hoặc hai ngón tay của tay đã tháo găng cầm lấy mặt trong cổ găng lật nhẹ ra ngoài. Sau đó cầm mặt trong đã được lật ra kéo lần lần cho găng ra khỏi tay đồng thời kéo luôn cả găng thứ nhất đang cầm ở lòng bàn tay.

- Tiến hành rửa lại tay cho đúng cách.

- Găng sử dụng bỏ vào thùng rác hay hộp chuyên dùng để tránh lây nhiễm vi khuẩn, nhiễm bẩn.

**5. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN**

Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ không cao hơn 37°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

**8. ĐIỀU KIỆN ĐỂ DUY TRÌ SỰ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ**

- Thông thường đeo găng của tay thuận trước và tháo găng tay của tay thuận sau.

- Trong trường hợp mặc áo choàng dài tay thì cần phải đeo găng sao cho găng tay bao trùm lên trên cổ tay áo choàng.

**Nơi gửi:**

- Bộ Phận Kinh doanh

- Các ĐV liên quan

- Lưu VT



Người Đại diện hợp pháp

Tổng Giám Đốc

Cn. Lưu Tiến Cao