

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Số 09, Đường Lam Sơn, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

1. **Tên thiết bị:** Mũi khoan mở tủy răng

2. **Chủng loại/ mã sản phẩm:**

Tên TTBYT	Chủng loại	Mã sản phẩm
Mũi khoan mở tủy răng	LuxaPost Bohrer 1,25	110734
Mũi khoan mở tủy răng	LuxaPost Bohrer 1,375	110735
Mũi khoan mở tủy răng	LuxaPost Bohrer 1,5	110736

3. **Hãng, nước sản xuất:** DMG Chemisch - Pharmazeutische Fabrik GmbH / Đức

4. **Hãng, nước chủ sở hữu:** DMG Chemisch - Pharmazeutische Fabrik GmbH / Đức

5. **Mục đích sử dụng:** Dùng trong nha khoa - Dùng để sửa soạn buồng ống tủy trước khi tái tạo cùi răng cho bệnh nhân.

6. **Chống chỉ định (Nếu có):** Người không có chuyên môn nha khoa hoặc không là kỹ thuật viên nha khoa chuyên nghiệp không được phép sử dụng mũi khoan.

7. **Hướng dẫn sử dụng:** Mang găng tay y tế và các bộ phận bảo hộ cần thiết.

Bước 1: Khử khuẩn mũi khoan với dung dịch khử khuẩn.

Bước 2: Xác định độ sâu của ống tủy và chiều dài của chốt tái tạo cùi răng LuxaPost để dễ dàng đưa chốt vào buồng ống tủy.

Bước 3: Sử dụng mũi khoan vào vị trí để sửa soạn với đường kính phù hợp.

Bước 4: Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong việc tái tạo cùi răng.

8. **Cảnh báo và thận trọng:**

- Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng mũi khoan.
- Để ngoài tầm với của trẻ nhỏ.
- Không được vệ sinh khử khuẩn dung dịch quá thời gian cho phép. VD: để qua đêm.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra các chức năng, tình trạng của mũi khoan xem chúng có bị oxy hóa không, bị mòn hoặc có biểu hiện không bình thường không trước khi sử dụng cho bệnh nhân nha khoa.
- Không sử dụng hóa chất cho mũi khoan, ngoại trừ dung dịch khử khuẩn.

- Không sử dụng mũi khoan đã quá hạn sử dụng.
- Không cầm, nắm hay tiếp xúc trực tiếp bằng tay trần với mũi khoan đã hoặc nghi ngờ bị nhiễm khuẩn.
- Sử dụng vật liệu thấm hút sau khi vệ sinh mũi khoan bằng dung dịch khử khuẩn.
- Khi tiến hành khoan nên quan sát tốc độ và lực tiếp xúc. Tránh nghiêng, uốn cong hoặc thả lỏng tay làm chệch hướng mũi khoan.
- Mang khẩu trang y tế và kính bảo hộ vì trong quá trình thao tác phần bụi từ việc khoan có thể bay vào mắt hay xâm nhập vào đường hô hấp.
- Xử lý rác thải theo quy định tại địa phương.

9. Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: Sử dụng mũi khoan LuxaPost này cùng với máy khoan nha khoa không đúng cách có thể dẫn đến rủi ro cho bệnh nhân, người sử dụng, gây mòn hoặc vỡ của các vật liệu khác.

10. Điều kiện bảo quản: Nơi khô thoáng, không bụi, nhiệt độ phòng.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU