

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MŨI KHOAN NHA KHOA

Mũi khoan Nha khoa là loại trang thiết bị y tế chuyên dụng dùng trong nha khoa, không thể thiếu trong việc điều trị các bệnh về nha khoa

Việc sử dụng mũi khoan nha khoa phải do Bác Sĩ chuyên khoa RHM, Nha sĩ hoặc kỹ thuật viên được đào tạo chuyên ngành nha khoa sử dụng cho việc điều trị các bệnh về nha khoa cho bệnh nhân.

Hướng dẫn sử dụng:

- Các mũi khoan nha khoa trước khi sử dụng để điều trị cho bệnh nhân phải được hấp tiệt trùng.
- Chọn loại mũi khoan nha khoa với kiểu dáng và độ thô mịn phù hợp với việc điều trị.
- Gắn vào tay khoan nha khoa đúng vị trí theo hướng dẫn sử dụng của loại tay khoan nha khoa
- Điều chỉnh áp lực hơi cho sự hoạt động của tay khoan nha khoa theo khuyến cáo của hãng sản xuất tay khoan nha khoa.
 - + Tốc độ tối đa từ 300.000 vòng tới 450.000 vòng/phút đối với tay khoan siêu tốc.
 - + Tốc độ tối đa 20.000 vòng/phút đối với tay khoan chậm.

Không để mũi khoan nha khoa hoạt động với tốc độ quá cao gây tổn thương tủy răng hoặc có thể gây sang chấn cho răng.

- Sau khi sử dụng mũi khoan nha khoa cho bệnh nhân, nếu muốn sử dụng lại cho bệnh nhân tiếp theo, mũi khoan nha khoa phải được làm sạch và hấp tiệt trùng đúng quy trình:
 - + Ngâm khử khuẩn trong dung dịch khử khuẩn trong 15 phút
 - + Làm sạch bằng bằng máy rung siêu âm
 - + Lau khô, đặt vào trong hộp hấp tiệt trùng chuyên dùng cho mũi khoan nha khoa hoặc đóng bao chuyên dụng
 - + Hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ 134°C với nồi hấp tiệt trùng (Autoclave)
 - + Bảo quản trong tủ vô trùng tia cực tím chờ sử dụng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022



Giám đốc: Nguyễn Việt Cường