



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## GIỚI THIỆU CHUNG

### **Bàn khám bệnh**

Model: BT644A; BT644B; BT644; BC644A; BC644B; BC644C

Nhà sản xuất: Better Medical Technology Co.,Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

#### 1. Lắp nệm

- Đặt nệm lên bàn khám sao cho phần vải nối giữa 2 mảnh nệm nằm ở mặt trên
- Dính các tai nệm vào những móc chờ sẵn trên bàn khám

#### 2. Thanh răng nâng/hạ phần đầu bàn khám:

- Nâng lên: Nhấc nhẹ phần đầu bàn khám lên độ cao phù hợp sao cho thanh chống vào đúng các rãnh có sẵn.
  - Hạ xuống: gạt thanh chống ra khỏi rãnh trượt, nhẹ nhàng hạ phần đầu bàn khám xuống.
  - Lưu ý: không được ngồi lên đầu bàn khám khi phần đầu bàn khám được nâng lên
- #### 3. Vệ sinh sản phẩm
- Lau nhẹ nhàng bằng khăn mềm, có thể dùng nước rửa kính hoặc cồn y tế sát khuẩn
  - Không dùng những hóa chất tẩy rửa mạnh, có tính axit...